

TQ DNIPRO

НОШІ М'ЯКІ «ДНІПРО» S

ТУ У 32.5-34228792-002:2023

Назва виробу:

Ноші м'які «Дніпро» S

Склад та опис виробу:

- Полотно з міцної, щільної синтетичної тканини: ширина - 720 ± 40 мм; довжина - 1880 ± 60 мм;
- Стропи для кріплення тулуба та ніг зі стрічки ремінної поліамідної з застібками, липучками для надійної фіксації ніг постраждалого;
- 6 ручок з кожного боку по довжині та ручка зі сторони узголів'я.

Призначення:

Для евакуації хворих, травмованих (поранених) до санітарного транспорту або пункту надання допомоги.

Застереження:

Повторно не використовувати. Використовувати згідно інструкції із застосування. Максимальне навантаження 140 кг.

Конструкція:

(мал. 1)

1, 2, 3 - ручки;

4 - стропа для кріплення тулуба з застібкою;

5 - стропа для кріплення ніг з липучкою - фіксатором;

6 - полотно нош;

7 - «HEAD» позначення

напрявлення розташування голови;

8 - кишень.



сайт: tqdnipro.com
електронна адреса: priem@prostir-e.com
Інструкція актуалізована 14.06.2023 р.



LOT



ТОВ «ВК ПРОСТІР»
Україна, 49013,
Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро,
ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
БЕЛІЛЮБСЬКОГО, будинок 68







ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБУ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Укладання та фіксація постраждалого:

1. Вийміть ноші з сумки для перенесення.
2. Розгорніть ноші і покладіть біля пораненого.
3. Поверніть постраждалого на бік, підкладіть ноші та покладіть на них постраждалого.
4. Голова постраждалого повинна бути повністю розташована на ношах (мал.2). Направлення розташування голови вказано позначенням «HEAD».
5. Зафіксуйте постраждалого, згідно схеми (мал.2):
 - За допомогою стропа для кріплення тулуба зафіксуйте пораненого та закріпіть застібкою (крок 1).
 - За допомогою стропа для кріплення ніг закріпіть кожну кінцівку окремо та зафіксуйте липучкою-фіксатором (крок 2). За необхідності пришвидшення евакуації, можливо виконати кріплення ніг спрощеним способом: обидві кінцівки разом закріпити стропою для кріплення ніг, фіксуючи липучкою-фіксатором, як вказано на мал.3, виконуючи послідовно крок 1, крок 2.
 - Заправте всі вільні кінці, щоб вони не заважали під час транспортування.
6. Після того, як поранений закріплений стропами для тулуба та ніг у ношах, його можна переміщувати, використовуючи ручки.

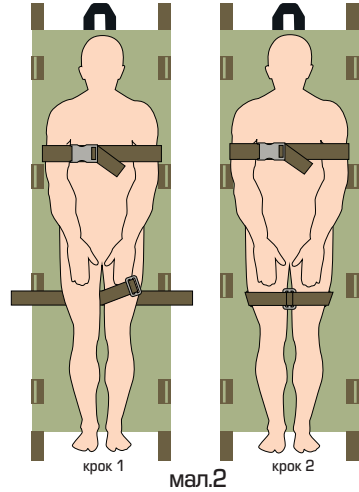

мал.2

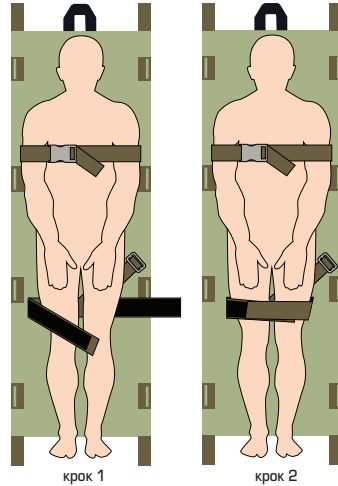

мал.3

У РАЗІ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ПЕРЕВИЩЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ БІЛЬШЕ ЗА 140 КГ, СПРАВНА РОБОТА ВИРОБУ НЕ ГАРАНТУЄТЬСЯ

Код партії	Дата виготовлення	Користуватися інструкцією із застосування	Захищати від сонячного світла
Виробник	Використати до...	Повторно не використовувати	Зберігати в сухому місці