

ТОВ «Делмед»
61013, м. Харків, вул. Шевченка 24
тел. +38(095) 6169365
zakaz@delmed.net
ЄДРПУ 23144629
Р/р UA77 351533 00000 26002052319108
Харківська філія Приватбанк
МФО 351533
Свідоцтво про держреєстрацію № 14801050002014103

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ
DELMEDE
www.delmed.com.ua



Шановний пацієнт!

Ви придбали груднопоперековий ортопедичний корсет, який було призначено Вам для поліпшення опорно-рухової функції груднопоперекового та попереково-клубового відділу хребта в період лікування або профілактики захворювання чи травми.

Використання корсета у відповідності з встановленими правилами дозволить Вам запобігти негативного впливу на стан здоров'я і буде сприяти Вашому одужанню.

Важливі відмінності нашого корсета:

Металеві ребра жорсткості дозволяють моделювати корсет багато разів, перегінати метал під Вашу фігуру. Ребра жорсткості трохи пружинять і тримають прогнуту Вами форму. Це дає велику жорсткість виробу і в більшості випадків досить для реабілітації при компресійному переломі. Матеріал основи - 100% бавовна, саржа - тканина джинсового плетіння. Міцна, дихаюча, приємна до тіла. Шнурівка збоку дає можливість регулювання обсягів в разі схуднення або набору ваги. Липучка попереду дозволяє швидко і легко протягом дня знімати і одягати корсет. Металеві ребра оброблені, щоб Ви могли прати корсет в міру забруднення. Ручне прання в теплій мильній воді.


Дія:

- корсет для грудного, середньогрудного і попереково-крижового відділів хребта;
- розвантаження і фіксація хребта, корекція постави;
- компенсація навантажень на хребет з одночасною корекцією і виробленням правильної постави;
- стабілізуюча дія на попереково-грудний відділи, саногенетична, мікромасажна дія на шкіру і м'язи спини;
- виражений реклінуючий ефект грудного відділу хребта.

Призначення:

- остеохондроз;
- спондилез, спондилолистез хребта, спондилопатії легкої міри;
- остеопороз;
- період реабілітації після травм і операцій на хребті;
- радікулопатії хребта;
- люмбалгії та ішіалгії;
- для осіб, по роду занять пов'язаних з тривалим навантаженням на хребет і вібраціями під час роботи (водії, мотоциклісти, вантажники, спортсмени);
- для профілактичних цілей;
- порушення постави різних стадій;
- кіфосколіотичні деформації будь-якого генезу I-III міри.

Керівництво з експлуатації Корсет грудопоперековий (артикул КГП)

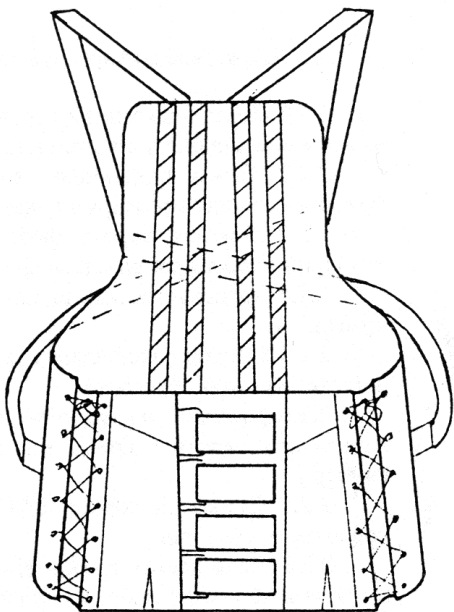

- 1.1 Корсети одягають на тулуб, одягнений у натільну білизну.
- 1.2 Застібки повинні знаходитись у застібнутому вигляді, навіть коли корсет знімають.
- 1.3 Корсети не повинні викликати стискування, ущемлення, порушення кровообігу, больових відчуттів при користуванні виробом та забезпечувати надійну фіксацію всього тулуба.
- 1.4 У разі виникнення негативних відчуттів треба послабити тиск за допомогою шнурівки або застібки або звернутись до лікаря чи відповідального робітника підприємства- виробника, що здійснює контроль за якістю виробу в період експлуатації.

2. Підготовка до користування корсетом

- 2.1 Перед надяганням корсета слід перевірити стан застібки текстильної. При появі на ній ниток від одягу слід голкою видалити нитки з обох сторін застібки.
- 2.2 Перед надяганням корсету треба вдягти бавовняну нижню білизну або футболку меншого розміру з рукавами, розправити її, усуваючи зморшки.
- 2.3 Одягати корсет треба стоячи. Іноді, за призначенням лікаря корсет пропонується вдягати лежачи.
- 2.4 Лямки на корсеті огортають плечі зверху вниз. Перехрещуються та вдіваються у рамки із зворотньою дією сбоку корсету.
- 2.5 Шнурівка у корсеті має функцію змінювання розміру та більш щільного фіксування корсету на тулубі з урахуванням індивідуальних особливостей статури пацієнта.

3. Користування корсетом

- 3.1 Режим користування корсетом у кожному конкретному випадку визначає лікар, що призначив корсет.
- 3.2 Контроль за лікуванням пацієнта, якому призначено корсет, тип виробу та визначення строків періодичних оглядів пацієнта здійснює лікар по місцю проживання пацієнта.
- 3.3 Рекомендації щодо користування виробом, елементами санітарно-гігієнічного догляду визначає лікар чи відповідальний працівник протезно- ортопедичного підприємства.

4. Технічне обслуговування та зберігання

- 4.1 Строк використання корсета залежить від догляду за ним та своєчасного усунення дефектів, які виникли в період експлуатації. Гарантійний строк експлуатації корсетів становить 6 місяців від дня видачі виробу в експлуатацію



- 4.2 Корсет зберігають у сухому приміщенні при температурі повітря від плюс 10°C до 35°C. Забороняється зберігання виробу в одному приміщенні з агресивними засобами.
- 4.3 Якщо в Вас виникають питання щодо користування та експлуатації виробу, будь-ласка звертайтеся за нашими телефонами +38(098)0544933, +38(050)9563341 з ПН по ПТ, з 9.00 до 17.00 години. Відправляйте повідомлення у Вайбер та Телеграмм на ці номери. Ми відповімо як можна швидше.

Додайте наші контакти до Вашого смартфона за допомогою QR коду.