


1. Функції клавiш


- ⏻ **Запуск/зупинка:** Якщо цю кнопку натиснути у стані очікування, пристрій почне працювати. Якщо цю кнопку натиснути в робочому стані, пристрій вимкнеться.
- ⚙ **Кнопка поступової зміни тиску:** Натисніть цю кнопку в робочому стані, щоб пристрій почав нарощувати тиск поступово.
- ⦿ **Кругла ручка:** Навігація в меню, вибір опцій, кнопка підтвердження.

2. Інструкції зі встановлення


2.1. Під'єднайте зволожувач, як показано на рисунку нижче.

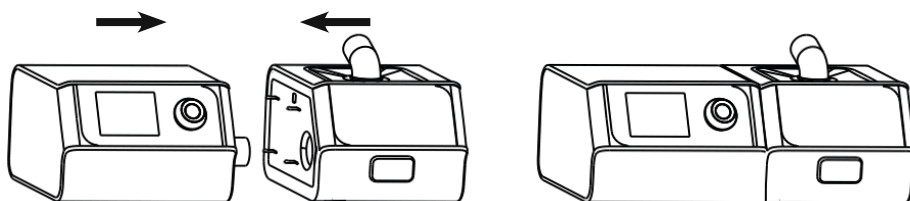

2.2. Долийте води у резервуар для води. Закрийте його, як показано на рисунку нижче:

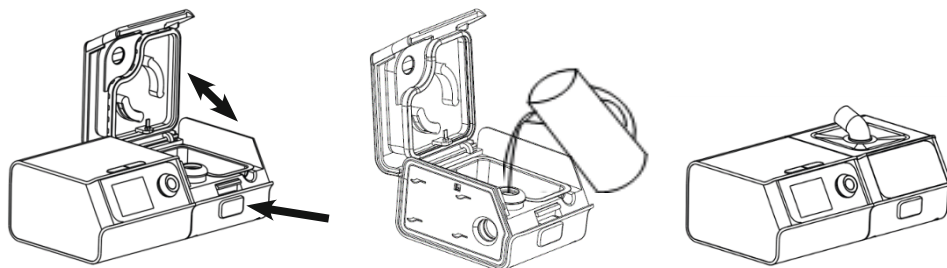

2.3. Під'єднайте трубку та маску, як показано на рисунку нижче.

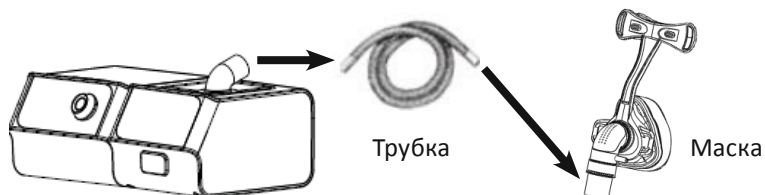


Примітка: Якщо зволожувач не використовується, під'єднайте трубку безпосередньо до випускного отвору основного пристрою.

2.4. Під'єднайте лінію живлення, як показано на рисунку нижче.



3. Налаштування параметрів

3.1. Увімкніть живлення пристрою: на пристрої відкриється інтерфейс очікування, як показано на рисунку нижче.

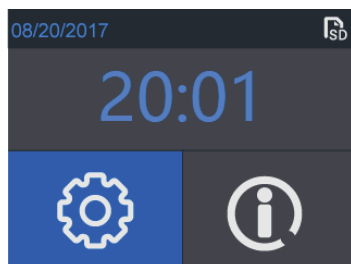

3.2. У інтерфейсі очікування натисніть на круглу ручку, щоб перейти в користувацький інтерфейс. Параметри регулюються у такий спосіб:

- Крутячи круглу ручку, виберіть параметр, який потрібно змінити, як показано на Рисунку 1.
- Натисніть на круглу ручку, щоб підтвердити вибір параметра, який потрібно змінити, як показано на Рисунку 2.
- Крутячи круглу ручку, відрегулюйте значення параметра.
- Натисніть на круглу ручку, щоб завершити регулювання параметра.

Коли всі параметри буде налаштовано, виберіть опцію повернення і натисніть на кнопку, щоб повернутися в інтерфейс очікування, як показано на Рисунку 3.

	sd
Ramp time	30
Humidifier	3
Auto On	On
Auto Off	Off

Рисунок 1

	sd
Ramp time	30
Humidifier	3
Auto On	On
Auto Off	Off

Рисунок 2

	sd
Language	English
Time&Date	...
About device	...
Back	

Рисунок 3

4. Початок терапії

Після налаштування параметрів надягніть маску і натисніть на кнопку запуску, щоб розпочати терапію.

Примітка: Перш ніж користуватися пристроєм, прочитайте всю інформацію в посібнику користувача!