

Инструкция по применению



Latebond®-SC

Адгезив химического отверждения

Назначение

Latebond-SC предназначен к применению в качестве адгезионного агента по эмали и дентину под пломбировочные композиционные материалы химического отверждения любого типа.

Свойства

Latebond-SC обладает высокой и стабильной адгезией к протравленному фосфорной кислотой эмали, дентину и к прокладкам из стеклоиономерных, поликарбоксилатных и фосфатных цемента.

Формула адгезива химически адаптирована к свойствам протравленных фосфорной кислотой поверхностей эмали и дентина таким образом, что в

процессе образования адгезионного контакта кроме микромеханических и адсорбционных связей возникают также прочные ионные связи.

Способ применения

Latebond-SC применяют по предварительно протравленному фосфорнокислым гелем поверхностям эмали и дентина.

Продолжительность травления дентина составляет 15 секунд, эмали-30-60 секунд.

Промывка водой после травления-15-20 секунд, сушка сжатым воздухом 10-15 секунд.

После просушивания в кювету помещают по 1 капле основной и катализаторной жидкостей адгезива и интенсивно перемешивают шпателем в течение 10-15 секунд.

Готовый адгезив сразу после перемешивания наносят аппликатором или кисточкой на протравленную поверхность зуба и стенки кариозной полости втирающими движениями в течение 20-30 секунд и обдувают сжатым воздухом 15-20 секунд.

Редакция 09.2020

Рекомендации. Latebond-SC следует наносить в 2 слоя.

Пломбировочный материал можно вносить в полость сразу после высушивания, не дожидаясь окончательного отверждения адгезива.

Кювету и шпатель очищают спиртом от адгезива до его отверждения.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материалы плотно закрыть.

ЧП «Латус»
61010 г. Харьков,
ул. Текстильная, 82
Тел. +380577332697
www.latus.com.ua



Только для профессионального использования



UA.TR.002



Інструкція по застосуванню



Latebond®-SC

Адгезив хімічного
твердіння

Призначення

Latebond-SC призначений для застосування в якості адгезійного агента по емалі та дентину під пломбувальні композиційні матеріали хімічного твердіння будь-якого типу.

Властивості

Latebond-SC володіє високою та стабільною адгезією до протруєних фосфорною кислотою емалі, дентину та до прокладок зі склоіономерних, полікарбоксилатних, та фосфатних цементів.

Формула адгезиву хімічно адаптована до властивостей протруєних фосфорною кислотою поверхонь емалі та дентину таким чином, що в процесі утворення адгезійного контакту крім

мікромеханічних і адсорбційних зв'язків виникають також міцні іонні зв'язки.

Спосіб застосування

Latebond-SC застосовують по попередньо протруєним фосфорнокислим гелем поверхням емалі та дентину.

Тривалість протруєння дентину становить 15 секунд, емалі-30-60 секунд.

Промивання водою після протруєння-15-20 секунд, сушка стисненим повітрям-10-15 секунд.

Після просушування в кювету поміщають по 1 крапле основної та каталізаторної рідин адгезиву та інтенсивно перемішують шпателем протягом 10-15 секунд.

Готовий адгезив відразу після перемішування наносять аплікатором або пензликом на протруєну поверхню зуба і стінки каріозної порожнини втираючими рухами протягом 20-30 секунд і обдувають стисненим повітрям 15-20 секунд.

Рекомендації. Latebond-SC слід наносити у 2 шари.

Редакція 09.2020

Пломбувальний матеріал можна вносити в порожнину відразу після висушування, не чекаючи остаточного затвердіння адгезиву.

Кювету і шпатель очищають спиртом від адгезиву до його затвердіння.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріали щільно закрити.



ПП «Латус»

61010 м. Харків,

вул. Текстильна, 82

тел. + 380577332697

www.latus.com.ua

**Тільки для
професійного
використання**



UA.TR.002

