

Инструкция по применению



Monotex®

Адгезив светоотверждаемый

Назначение

Monotex предназначен для применения в качестве адгезивного агента по эмали и дентину под светоотверждаемые пломбировочные композиционные материалы любого типа.

Свойства

Monotex обладает высокой и стабильной адгезией к протравленным фосфорной кислотой эмали и дентину, как за счёт свойств связующего, так и за счёт проникновения микрочастиц наполнителя в дентинные каналы на большую глубину, чем только жидкость ненаполненных адгезивных систем.

Способ применения

Перед нанесением адгезива необходимо протравить поверхность эмали и дентина фосфорнокислым гелем. Продолжительность травления дентина составляет 15 секунд, эмали - 30 секунд.

Промывка водой после травления осуществляется на протяжении 15-20 секунд, сушка сжатым воздухом - 10-15 секунд. Каплю адгезива Monotex из флакона-капельницы наносят на аппликатор и втирают в полость зуба 10-15 секунд, после этого сушат сжатым воздухом в течение 10-15 секунд. Monotex наносят в один слой без последующей фотополимеризации. Далее проводится пломбирование в соответствии с инструкцией по применению композита с обязательным нанесением первого тонкого слоя - не более 0,5 мм.

Рекомендации

Перед началом использования содержимое флакона взболтать.

При значительных обнажениях дентина рекомендуется перед

Редакция 08.2020

нанесением адгезива Monotex нанести на поверхность дентина 3-4 раза дентин-праймер Saturool.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C.

После использования материал плотно закрыть.

ЧП "Латус"

61010 г. Харьков

ул. Текстильная, 82

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua

**Только для
профессионального
использования**



UA.TR.002



Інструкція по застосуванню



Monotex[®]

Адгезив світлотверднучий

Призначення

Monotex призначений до застосування в якості адгезивного агента по емалі та дентину під світлотверднучі пломбувальні композиційні матеріали будь-якого типу.

Властивості

Monotex має високу та стабільну адгезію до протруєних фосфорною кислотою емалі та дентину, як за рахунок властивостей сполучника, так і за рахунок проникнення мікрочасток наповнювача у дентинні канальці на більшу глибину, ніж тільки рідина ненаповнених адгезивних систем.

Спосіб застосування

Перед нанесенням адгезиву необхідно протруїти поверхню емалі та дентину фосфорнокислим гелем. Тривалість труїння дентину складає 15 секунд, емалі-30 секунд. Промивка водою після труїння здійснюється протягом 15-20 секунд, сушка стисненим повітрям -10-15 секунд. Краплю адгезиву Monotex з флакона-крапельниці наносять на аплікатор і втирають у порожнину зуба протягом 10-15 секунд, після цього сушать стисненим повітрям протягом 10-15 секунд. Monotex наносять в один шар без подальшої фотополімеризації. Далі проводиться пломбування у відповідності з інструкцією по застосуванню композиту з обов'язковим нанесенням першого тонкого шару не більш, як 0,5 мм.

Рекомендації

Перед використанням вміст флакону збовтати.

При значних оголеннях дентину рекомендується перед нанесенням адгезиву Monotex нанести на

Редакція 08.2020

поверхню дентину 3-4 рази дентин-праймер Saturool.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C.

Після використання матеріал щільно закрити.

ПП "Латус»

61010 м. Харків

вул. Текстильна 82

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua

**Тільки для
професійного
використання**



UA.TR.002

