



# Ftorcalcit®-E

Солевая система для глубокого фторирования эмали

## Назначение

Ftorcalcit-E предназначен к применению в стоматологической практике для: десенсibilизации шейки зуба, локальной профилактики и лечения кариеса зубной эмали, минерального запечатывания фиссур.

## Свойства

Комплект Ftorcalcit-E включает жидкость №1 и жидкость №2.

Последовательное нанесение жидкости №1 и №2 Ftorcalcit-E обеспечивает глубокое фторирование зубной эмали или костного цемента шейки зуба. В результате реакции между компонентами жидкостей образуется гель кремниевой кислоты и распределенные в нём кристаллики фторида кальция, магния и меди. Высокая концентрация ионов фтора и меди обеспечивает защиту зуба от кариесогенных микроорганизмов, стимулирует регенерацию тканей пародонта.

## Способ применения

### Десенсibilизация шейки зуба.

Обрабатываемый участок зуба очищают от зубного налета при помощи круглой щетки пастой для клинической чистки, промывают водой и просушивают сжатым воздухом. Шейку зуба в течение 30 секунд обильно смачивают ватным тампончиком, пропитанным жидкостью №1 Ftorcalcit-E. После этого, не производя промежуточного полоскания, на шейку зуба наносят жидкость №2 Ftorcalcit-E и через

30 секунд проводят полоскание. Процедуру повторяют еще 2 раза через 1-3 недели. В дальнейшем процедуру проводят 1-2 раза в год.

**Внимание!** Не допускать попадания жидкостей в глаза!

### Профилактика кариеса путем глубокого фторирования.

Зубы очищают зубной щеткой, включая межзубное пространство. Просушивают сжатым воздухом и обрабатывают поквадратно с помощью тампона, смоченного жидкостью №1 Ftorcalcit-E. Затем, не делая полоскания, наносят жидкость №2 Ftorcalcit-E и через минуту полощут рот.

Процедуру проводят 1-2 раза в год.


### Минеральная герметизация фиссур.

Фиссуры предварительно очищают от мягкого налета, просушивают сжатым воздухом и смачивают препаратами, как указано выше при профилактике кариеса. В дальнейшем процедуру повторяют 1 раз в год, не изменяя способ профилактики кариеса методом глубокого фторирования.

## Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материалы плотно закрыть.

ЧП "Латус",  
61010, г. Харьков,  
ул. Текстильная, 82.  
Тел. +380577332697  
[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)

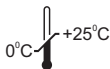

**Только для  
профессионального  
использования**





# Ftorcalcit®-E

Сольова система для  
глибокого фторування емалі

## Призначення

Ftorcalcit-E призначений до застосування в стоматологічній практиці для: десенсибілізації шийки зуба, локальної профілактики і лікування карієсу зубної емалі, мінерального запечатування фісур.

## Властивості

Комплект Ftorcalcit-E включає рідину №1 і рідину №2.

Послідовне нанесення рідини №1 і №2 Ftorcalcit-E забезпечує глибоке фторування зубної емалі або кісткового цементу шийки зуба. В наслідок реакції між компонентами рідин утворюється гель кремнієвої кислоти і розподілені у ньому кристали фториду кальцію, магнію і міді. Висока концентрація іонів фтору і міді забезпечує захист зуба від карієсогенних мікроорганізмів, стимулює регенерацію тканин пародонту.

## Спосіб застосування

### Десенсибілізація шийки зуба

Ділянку зуба, яка обробляється, очищають від зубного нальоту за допомогою круглої щітки пастою для клінічного чищення, промивають водою і просушують стисненим повітрям. Шийку зуба протягом 30 секунд рясно змочують ватяним тампоном, просоченим рідиною №1 Ftorcalcit-E. Після цього, не роблячи проміжного полоскання, на шийку зуба наносять рідину №2 Ftorcalcit-E і через 30 секунд проводять полоскання. Процедуру повторюють

ще 2 рази через 1-3 тижні. Надалі процедуру проводять 1-2 рази на рік.

**Увага!** Не допускати попадання рідин в очі!

### Профілактика карієсу шляхом глибокого фторування

Зуби, очищають зубною щіткою, включаючи міжзубний простір. Просушують стисненим повітрям і обробляють поквдратно за допомогою тампона, змоченого рідиною №1 Ftorcalcit-E. Потім, не роблячи полоскання, наносять рідину №2 Ftorcalcit-E і через хвилину полощуть рот.

Процедуру проводять 1-2 рази на рік.


### Мінеральна герметизація фісур

Фісури заздалегідь очищають від м'якого нальоту, просушують стисненим повітрям і змочують препаратами, як вказано вище при профілактиці карієсу. Надалі процедуру повторюють 1 раз на рік, не змінюючи спосіб профілактики карієсу методом глибокого фторування.

## Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріали щільно закрити.

ПП "Латус",  
61010, м. Харків,  
вул. Текстильна, 82  
Тел. +380577332697  
[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)

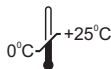

**Тільки для  
професійного  
використання**

