



Saturol®

Дентин-праймер

Назначение

Saturol предназначен для увлажнения и пропитывания дентина с целью обеспечения хорошей адгезии перед наложением прокладочного материала.

Свойства

Saturol не содержит инициаторов полимеризации, поэтому полимеризуется за счет механизма цепной полимеризации прокладки цемента.

Благодаря оптимально выбранному соотношению компонентов, дентин-праймер модифицирует микропористую структуру дентина.

Способ применения

После препаровки кариозной полости известными методами оценивают необходимость применения изолирующей прокладки по дентину.

Для очистки кариозной полости от смазанного слоя ее необходимо обработать фосфорнокислым гелем в течение 15 секунд, промыть водой от стоматологической установки 10-15 секунд и просушить чистым сжатым воздухом. При малой толщине дентина (примерно 1 мм) делают только тщательную промывку теплой водой без применения травящих средств.

После этого при помощи микроаппликатора на подготовленную поверхность дентина наносят дентин-праймер, втирая его 15-20 секунд, или наносят кратковременно 3-4 раза.

Затем полость просушивают 10-15 секунд и наносят прокладочный композиционный цемент по методике его применения.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C.

После использования материал плотно закрыть.



ЧП «Латус»

61010 г. Харьков
ул. Текстильная, 82
тел. +380577332697

www.latus.com.ua

**Только для
профессионального
использования**



UA.TR.002





Saturol®

Дентин-праймер

Призначення

Saturol призначений для зволоження і просочування дентину з метою забезпечення гарної адгезії перед накладанням прокладкового матеріалу.

Властивості

Saturol не містить ініціаторів полімеризації, тому полімеризується за рахунок механізму ланцюгової полімеризації прокладки цементу.

Завдяки оптимально обраному співвідношенню компонентів, дентин-праймер модифікує мікропористу структуру дентину.

Спосіб застосування

Після препарування каріозної порожнини відомими методами оцінюють необхідність застосування ізолюючої прокладки по дентину.

Для очищення каріозної порожнини від змащеного шару її необхідно обробити фосфорнокислим гелем протягом 5 секунд, промити водою від стоматологічної установки 10-15 секунд і просушити чистим стисненим повітрям. При малій товщині дентину (приблизно 1 мм) роблять тільки ретельну промивку теплою водою без застосування труючих засобів.

Після цього за допомогою мікроаплікатора на підготовлену поверхню дентину наносять дентин-праймер, втираючи його 15-20 секунд або наносять короткочасно 3-4 рази.

Потім порожнину просушують 10-15 секунд і наносять

прокладочний композиційний цемент за методикою його застосування.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C.

Після використання матеріал щільно закрити.



ПП «Латус»

61010 м. Харків

вул. Текстильна 82

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua

**Тільки для
професійного
використання**



UA.TR.002

