



Рампа 240 см

OSD-FR102

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.

Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1.	Вступ.....	3
2.	Призначення.....	3
3.	Заходи безпеки	3
4.	Технічні характеристики.....	4
5.	Загальна характеристика.....	5
6.	Налаштування та опис функцій.....	5
7.	Транспортні рекомендації.....	6
8.	Технічне обслуговування і догляд.....	6
9.	Відомості про сертифікацію.....	7
10.	Умови гарантії.....	8

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте пандус, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте пандус у випадку його пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Цей посібник користувача містить опис медичного пристрою та важливі вказівки для забезпечення правильного та безпечного виробу. Перед використанням важливо уважно прочитати цей посібник. Особливо важливо, щоб ознайомтеся з вимогами безпеки та дотримуйтесь їх.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які технічні характеристики та функції продукту, зазначені у цій Інструкції, з метою покращення продукції. Усі дані, зазначені у Інструкції, наведені для ознайомлення.

2. Призначення

Рампа 240 см «OSD-FR102» (далі за паспортом – пандус/ рампа / виріб / пристрій / обладнання) – це медичний пристрій, який призначений виключно для допомоги пацієнтам, які користуються кріслами колісними або скутерами. Пристрій дає змогу долати підвищені місця (наприклад, сходи) з допомогою або без допомоги помічника.

Пандус дозволяє пацієнтам, які сидять в кріслі колісному, в'їжджати або виїжджати з будівель, автомобілів, автобусів тощо. Пандус можна використовувати як всередині, так і зовні. Будь-яке інше використання заборонено.

3. Заходи безпеки

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування пандуса за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

1. Перед використанням **УВАЖНО** ознайомтеся з Інструкцією.
2. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що цей посібник користувача прочитали всі особи, які використовують пристрій. Виробник не несе жодної відповідальності за збитки та/або травми, спричинені недотриманням інструкції з експлуатації.
3. Перед кожним використанням **ПЕРЕВІРЯЙТЕ** загальний технічний стан виробу.

Використовуйте продукт лише в бездоганному стані. Не використовуйте його у випадку виявлення пошкоджень.

4. У разі виявлення дефектів або помилок необхідно негайно звернутися до дилера.
5. Дотримуйтесь інформації на етикетці виробу.
6. **ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИРІБ ЛИШЕ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ.**
7. Уникайте внесення конструктивних змін у пристрій, якщо ви не маєте письмового дозволу виробника на такі модифікації.
8. Під час різних регулювань, які можливі на пристрої, користувач повинен стежити, щоб не притиснути пальці до інші частини тіла між двома рухомими елементами пристрою.
9. Пристрій можна використовувати тільки на стійкій поверхні.
10. Рампа не повинна бути завантажена більше, ніж "максимальне навантаження", вказане в технічних характеристиках на етикетці.
11. **БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ** під час складання та розкладання рамп. Існує ризик застрягти або порізати пальці між частинами рамп.
12. Під час підйому / спуску пацієнта **УНИКАЙТЕ** різких рухів та розгойдування.
13. Під час підйому / спуску пацієнта **ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ** на те, щоб рухи його тіла не були обмежені.

4. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-FR102
Матеріал:	алюміній
Розміри, Д х Ш, (см):	240 x 71
Розміри у складеному вигляді, Д х Ш х В, (см):	136 x 41 x 26
Гарантійний термін, (міс.):	12

5. Загальна характеристика




Перевіряйте справність пандуса перед кожним використанням, якщо виріб використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, не використовуйте виріб.

- Пандус «OSD-FR102» - складана платформа, виготовлена з алюмінію.
- Призначена для подолання пагорбів і сходинок, полегшує спуск крісла колісного з автомобіля.
- Поверхня покрита спеціальним матеріалом, який запобігає ковзанню.
- Обладнаний обмежувальними бортами по боках для безпечного з'їзду.
- Завдяки конструкції, що складається, за допомогою ручки виріб зручно переносити і транспортувати.
- У складеному вигляді пандус не займає багато місця для зберігання.

Пандус поставляється в картонній упаковці. Комплектація:

- пандус;
- посібник користувача.

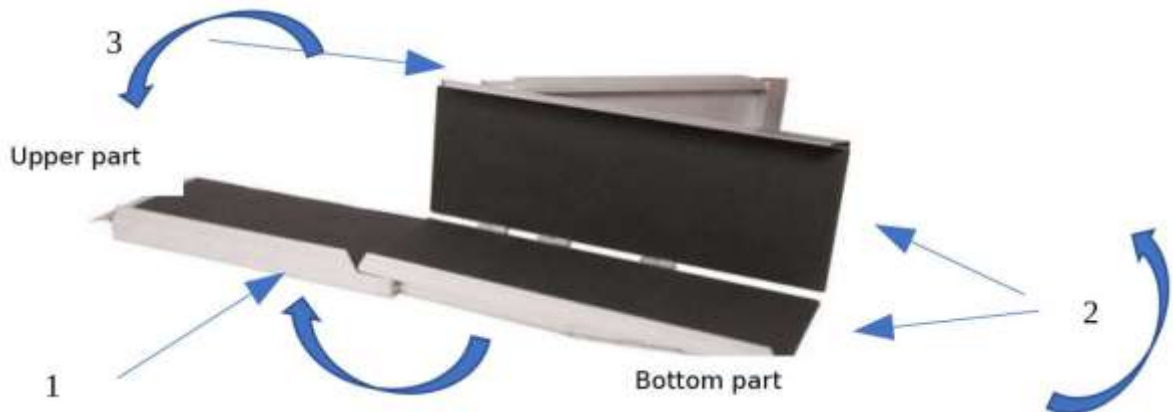

6. Налаштування та опис функцій

- Пандуси позначені етикеткою А та етикеткою В.
- Етикетка А розміщується на верхній стороні пандуса (стороною, що прилягає до перешкоди).
- Етикетка В розміщується на нижній стороні рампи (стороні, що знаходиться на землі).
- Пандус повинен бути встановлений на стійкій поверхні.
- Переконайтеся, що пандус стійкий, перш ніж заїжджати на нього.

7. Транспортні рекомендації

Пандус можна скласти (за допомогою шарніра) для транспортування і зафіксувати. Під час транспортування завжди слідкуйте за тим, щоб пандус був надійно захищений від ненавмисних рухів.

8. Технічне обслуговування і догляд

За умов забруднення пристрою його поверхню можна обробляти неагресивними миючими та дезінфікуючими засобами, уникаючи рухливих частин та елементів. Щоразу перед початком експлуатації слід візуально оглянути пристрій на наявність пошкоджень. У разі сумнівів не використовуйте пристрій і не намагайтеся полагодити самостійно. Зверніться до місцевого дилера або до місця придбання товару за подальшими інструкціями.

Зовнішню поверхню пандуса обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте пандус у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції підйомника, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

¹ Цей прилад ТМ «OSD» виготовлено в умовах застосування системи суворого контролю якості.

² Пандус для крісла колісного «OSD-FR102» відповідає технічним умовам і визнаний придатним для експлуатації.

9. Відомості про сертифікацію

Виріб «OSD-FR102» відповідає технічним вимогам і визнаний придатними для експлуатації.



Виробник: Combo (Zhongshan) Medical Equipment Co.,Ltd. , Building 1, № 6, East Tongxing Road, Dongshen Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China/ Комбо (Жонгшан) Медікал Еквіпмент Ко., Лтд. , Білдинг 1, № 6, Еаст Тонгксінг Роад, Донгшен Товн, Жонгшан Сіті, Гуандонг Провінсе, Китай.



Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа». Адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2. Тел.: +38 (044) 232-44-51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 16.12.2024.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на виріб «OSD-FR102» – 12 місяців з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.



10. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____