



Ортопедична подушка:

OSD-SP414106-20

Інструкція

## ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією. Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження. Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Ортопедична подушка «OSD-SP414106-20» (далі за паспортом – виріб / подушка) – рекомендована для застосування у медичних закладах та вдома.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.



**Запобігайте контакту продукту з гострими предметами, а також потраплянню попелу від цигарок.**

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЯКЩО ВІЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВОДЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- РЕГУЛЯРНО** перевіряйте цілісність усього виробу.
- НЕ ТРИМАЙТЕ** виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі сонячні промені, відкрите полум'я).
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** щільні товсті матерії, покривала тощо. Це зменшить терапевтичний ефект дії виробу. За необхідності проконсультуйтеся з лікарем.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попаданню на виріб маслянистих або жирних речовин. Це може порушити структуру матеріалу покриття подушки та порушити її функціональність.
- З МІРКУВАНЬ ПІПІЄНИ** усі засоби, що використовуються для профілактики пролежнів повинні **ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ ВИКЛЮЧНО** одним пацієнтом.
- У ВИПАДКУ** нетримання сечі, чохол і сама подушка **ПОВИННІ** бути **ОЧИЩЕНІ**.
- НЕ ПРОКОЛЮЙТЕ** виріб.
- У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекції.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Модель:	OSD-SP414106-20
Призначення:	для сидіння
Матеріал:	пінополіуретан
Чохол:	основа – 35 % PU-волокно + 65 % поліестер; нижня частина – 80 % ДОФ + 20 % ПВХ
Розміри, Д x Ш x В, (см):	40 x 50 x 5/8
Вага виробу, (гр):	800
Макс.навантаження, (кг):	140

## ОЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПОДУШКИ

### Очищення



- Прання у делікатному режимі до 30 °С.
- Не піддавати сухому хімічному чищенню.
- Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, що містять хлор).
- Сушити далеко від джерел тепла.
- Не прасувати.

### Зберігання

- Зберігати на рівній поверхні.
- Не допускати дії інтенсивного тепла.
- Для максимальної довговічності має зберігатися у теплому, чистому місці, захищений від вогню та світла.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Обробляйте виріб дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

## УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
  - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
  - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА:** Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

## ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

**Виріб «OSD-SP414106-20»** відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

**Виробник:** China Effort Limited / Чайна Еффорд Лімітед, RM 2806-7 New Treasure Centre, 10 Ng Fong Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong / PM 2806-7 Нью Трешью Сентр, 10 Нг Фонг Стріт, Сан По Конг, Каулун, Гонг Конг.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр.Голосіївський, 100/2. Тел.: +38 (044) 232-44-51, e-mail: office@osd.com.ua

**Номер редакції:** № 3 від 25.04.2024.

**Дата виготовлення:** див. на упаковці.

**Термін придатності виробу:** див. на маркованні.

**Гарантійний термін на виріб «OSD-SP414106-20»** – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

