



Рампа 6'

OSD-STDS1097

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1. Вступ	3
2. Заходи безпеки	3
3. Технічні характеристики.....	4
4. Загальна характеристика.....	4
5. Технічне обслуговування і догляд	5
6. Належна утилізація продукту	5
7. Відомості про сертифікацію	6
8. Умови гарантії.....	7

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією та дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте пандус, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте пандус у випадку його пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Пандус для інвалідного візка «OSD-STDS1097» (далі за паспортом – пандус / виріб / пристрій / обладнання) – це похила поверхня, що дублює сходи, збудована на підставі ДБН В.2.2-9-99 для пересування осіб, які користуються колісними кріслами. Використовується на вулиці та у різних медичних установах.

Пандус для інвалідного візка «OSD-STDS1097» розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будьякі технічні характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені у Інструкції, наведені для ознайомлення.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

2. Заходи безпеки

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування пандуса за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

1. Перед використанням **УВАЖНО** ознайомтесь з Інструкцією.
2. Перед кожним використанням **ПЕРЕВІРЯЙТЕ** загальний технічний стан виробу. Не використовуйте його у випадку виявлення пошкоджень.
3. Максимально допустиме навантаження на пандус становить – 272 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
4. Кожні два роки слід **ПРОВОДИТИ** повний кваліфікований технічний огляд пандусу.
5. Під час підйому / спуску пацієнта **УНИКАЙТЕ** різких рухів та розгойдування.

6. Під час підйому / спуску пацієнта ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ на те, щоб рухи його тіла не були обмежені.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-STDS1097
Матеріал:	алюміній
Загальний розмір, Д x Ш, (см):	182 x 71
Розмір секції, Д x Ш, (см):	182 x 35
Вага, (кг):	13,34
Максимальне навантаження, (кг):	272
Рекомендована ширина візка (см):	65
Гарантійний термін, (міс.):	12

4. Загальна характеристика



Перевіряйте справність пандуса перед кожним використанням, якщо виріб використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на шість місяців. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, не використовуйте виріб.

Особливості пандуса «OSD-STDS1097»:

- Міцний складаний пандус для подолання пагорбів і сходинок, полегшує спуск інвалідного візка з автомобіля.
- Ребриста поверхня пандуса забезпечує плавний з'їзд і підйом, запобігає ковзанню.
- Обладнаний обмежувальними бортами по боках для безпечного з'їзду.
- Завдяки конструкції, що складається та сумки виріб зручно переносити і транспортувати у машині.
- У складеному вигляді пандус не займає багато місця для зберігання.

5. Технічне обслуговування і догляд

За умов забруднення пристрою його поверхню можна обробляти неагресивними миючими та дезінфікуючими засобами, уникаючи рухливих частин та елементів. Щоразу перед початком експлуатації слід візуально оглянути пристрій на наявність пошкоджень. У разі сумнівів не використовуйте пристрій і не намагайтеся полагодити самостійно. Зверніться до місцевого дилера або до місця придбання товару за подальшими інструкціями.

Зовнішню поверхню пандуса обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте пандус у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції підйомника, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

¹ Цей прилад ТМ «OSD» виготовлено в умовах застосування системи суворого контролю якості.

² Пандус для інвалідного візка «OSD-STDS1097» відповідає технічним умовам і визнаний придатним для експлуатації.

6. Належна утилізація продукту

Цей символ на приладі або в паспорті до нього вказує, що даний продукт не підлягає утилізації разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, будь ласка, відокремте цей прилад від інших типів відходів і утилізуйте його належним чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.

Даний продукт не містить ніяких шкідливих речовин.



7. Відомості про сертифікацію

Виріб «OSD-STDS1097» відповідає технічним вимогам і визнаний придатними для експлуатації.



Виробник: Zhenjiang Assure Medical Equipment Co., Ltd / ЧженьцзянЕшье
Медікал Еквіпмент Ко., Лтд No.297, Chuqiao road, Zhenjiang City,
Jiangsu Province, China / №297, Чуцяо Роад, Чженьцзян Сіті, Цзянсу
Провінс, Китай.



Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна
Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2.

Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 3 від 05.09.2023.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на пандус для інвалідного візка «OSD-STDS1097» – 12 місяців з дати
продажу за умови виконання вимог Інструкції.

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.



8. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____