



**KING-30-00 / KING-45-00 / KING-60-00
/ KING-15-00 / KING-15L-00 / KING-12A-00 / KING-10-00 / KING-10L-00**

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Санітарно-гігієнічне обладнання «KING-30-00 / KING-45-00 / KING-60-00 / KING-15-00 / KING-15L-00 / KING-12A-00 / KING-10-00 / KING-10L-00» (далі за паспортом – виріб / поручень / туалетне сидіння / сидіння для туалету / насадка / сидіння) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком використання виробу або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- НЕОБХІДНО** періодично оглядати виріб на стійкість.
- КОРИСТУВАЧАМ** з обмеженими фізичними можливостями **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** звертатися за допомогою до асистента.
- У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настінні поручні

Параметр	Значення		
Модель:	KING-30-00	KING-45-00	KING-60-00
Матеріал:	ABS-пластмаса		
Колір:	білий		
Довжина, (см):	30	45	60
Діаметр трубки, (см):	3,7		
Відстань від стіни, (см):	4		

Туалетні сидіння

Параметр	Значення		
Модель:	KING-15-00 / KING-10-00	KING-15L-00 / KING-10L-00	KING-12A-00
Матеріал:	гігієнічна пластмаса		
Колір:	білий		
Висота, (см):	15 / 10	15 / 10	12
Максимальне навантаження, (кг):	225	225	130
Комплектація:	–	кришка	поруччя

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.

2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:

а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);

в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.

3. Гарантія не розповсюджується на:

а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу

сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
в) пошкодження, які викликані побутовими факторами,

зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.

4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Санітарно-гігієнічне обладнання «KING-30-00 / KING-45-00 / KING-60-00 / KING-15-00 / KING-15L-00 / KING-12A-00 / KING-10-00 / KING-10L-00» відповідає технічним вимогам і визнано придатним для експлуатації.



Виробник: LM Global Design Ltd / ЛМ Глобал Дизайн Лтд Suite 123, The Capel Building, Mary's Abbey, Dublin 7, D07 VY68 Ireland / Сьюїт 123, Зе Капел Білдинг, Аббатство Марії, Дублін 7, Ді07 ВіУай68 Ірландія

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2.

Номер редакції: № 4 від 25.09.2023.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: див. на маркуванні.

Гарантійний термін на санітарно-гігієнічне обладнання «KING-30-00 / KING-45-00 / KING-60-00 / KING-15-00 / KING-15L-00 / KING-12A-00 / KING-10-00 / KING-10L-00» – 1 рік з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

