



Обертове крісло для ванної

OSD-Q650100

Інструкція з експлуатації



Дякуємо, що обрали нашу продукцію.
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання.



Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄЕС

ЗМІСТ

1. Вступ.....	3
2. Заходи безпеки	3
3. Технічні характеристики.....	3
4. Загальна характеристика.....	4
5. Рекомендації зі встановлення	5
6. Технічне обслуговування і догляд.....	6
7. Відомості про сертифікацію.....	6
8. Умови гарантії	7

1. Вступ

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте сидіння для ванни, не ознайомившись з Інструкцією.

Не використовуйте сидіння для ванни у випадку його пошкодження.

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Обертове крісло для ванни «OSD-Q650100» (далі за паспортом – сидіння для ванни / сидіння) – рекомендоване для застосування вдома та у медичних закладах. Використовується для підвищення рівня комфорту під час проведення гігієнічних процедур.

Обертове крісло для ванни «OSD-Q650100» розроблене для максимальної зручності та безпеки користувача. Розраховане для використання у житлових приміщеннях, а саме у ванній кімнаті.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

2. Заходи безпеки

Перед початком використання сидіння для ванни або під час використання після тривалого зберігання переконайтеся, що всі частини закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте загальний технічний стан.

1. **НЕОБХІДНО** періодично оглядати сидіння на стійкість.
2. Користувачам з обмеженими фізичними можливостями **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** звертатися за допомогою до асистента.
3. Максимально допустиме навантаження на сидіння для ванни – 100 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
4. На разі використання виробу різними особами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати сидіння, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування сидіння для ванни, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

3. Технічні характеристики

Параметр	Значення
Модель:	OSD-Q650100
Матеріал сидіння та спинки:	гіпоалергенна пластмаса
Матеріал каркасу:	сталь
Колір:	білий
Розмір сидіння, Д х Ш, (см):	43 x 40
Висота спинки. (см):	34
Максимальне навантаження, (кг):	100

4. Загальна характеристика

- ❖ Сидіння «OSD-Q650100» від OSD TM підходить до більшості стандартних ванн.
- ❖ Гіпоалергенна пластмаса швидко нагрівається до температури тіла та надовго зберігає тепло. Легко дезінфікується.
- ❖ Сидіння обладнане спеціальними дренажними отворами для зливу води.
- ❖ Гумові наконечники на ніжках крісла забезпечують надійність фіксації на поверхні ванни.
- ❖ Сидіння обладнане спинкою для більшого комфорту користувача.
- ❖ Сидіння для ванни легко кріпиться без використання додаткових інструментів. Тип кріплення підходить до більшості ванн.
- ❖ Зручна форма крісла забезпечує особливий комфорт для користувача.
- ❖ Сидіння обертається навколо своєї осі на 360 °, що надає можливість без зусиль повертати пацієнта для максимально зручного миття. Фіксується через кожні 90 °.
- ❖ Нерухома частина опорної рами (див. Рис. 1) складається з двох з'єднаних сталевих трубок. Ця нерухома рама розташована на краях ванни, і зафіксована у положенні двома різьбовими стрижнями, які розташовані у гайці, привареною посередині кожної поперечної балки. Різьбові стрижні повинні бути відрегульовані до тих пір, поки вони не будуть зафіксовані з кожного боку ванни.



Рис. 1. Фіксована рама

- ❖ Шарнірна рама (див. Рис. 2) складається з контурної сталевих труби, звареної у формі кільця, яка функціонує як в якості корпусу для пластикового сидіння, так і в якості опори підлокітників. Ця конструкція приварена до квадратної планки, яка, в свою чергу, приварена до обертової втулки. Ці дві рами з'єднані разом гвинтом, який з'єднує обертову втулку поворотної рами з попередньо просвердленою пластиною нерухокої рами.

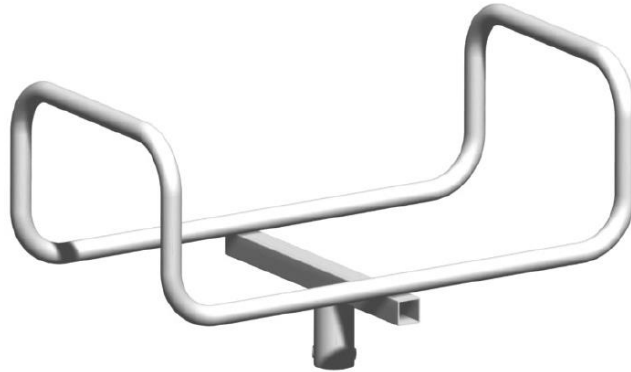


Рис. 2. Шарнірна рама

- ❖ Сидіння з литого під тиском пластику кріпиться до поворотної рами за допомогою 4 гвинтів.

5. Рекомендації зі встановлення

1. Переконайтеся, що чотири трубки з гумовими наконечниками правильно розташовані на краях ванни.
2. Відрегулюйте різьбові стрижні на кожній стороні, обертаючи їх, доки їх резинові наконечники не потраплять на бік ванни, переконавшись, що пристрій зафіксований у потрібному положенні та не рухається.
3. Покладіть сидіння (див. Рис. 3), зафіксуйте його, установіть важіль у відповідний отвір.

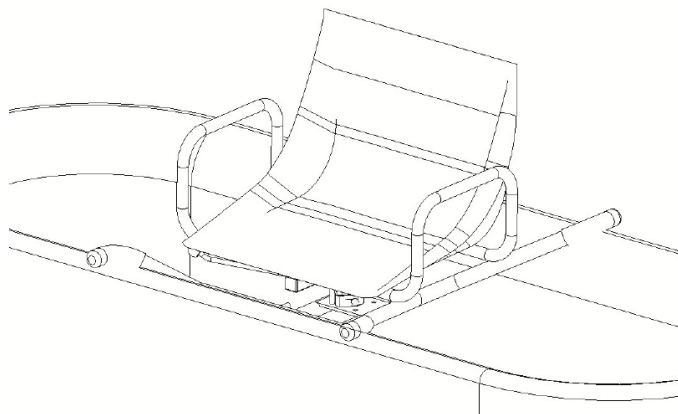


Рис. 3. Положення сидіння на ванні

4. Посадіть користувача на місце та поверніть сидіння за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, якщо це необхідно, звільнивши важіль безпеки.
5. Під час виконання вищезазначених рекомендацій зі встановлення зверніть увагу на ноги користувача.

6. Технічне обслуговування і догляд



Перевіряйте справність сидіння для ванни перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів одного або декількох деталей, **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

Зовнішню поверхню сидіння для ванни обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте сидіння для ванни у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою теплої води та м'яких засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції сидіння для ванни, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

7. Відомості про сертифікацію

Обертове крісло для ванної «OSD-Q650100» відповідає технічним вимогам і визнане придатним для експлуатації.



Виробник: Zhongshan Qunn Medical Equipment Co., Ltd. / Жонгшан Куїнн Медікал Еквіпмент Ко., Лтд.

3rd Booth No. 108 Zhaoyi Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong, The people's republic of China / 3 Бус №108 Чжаойі Род, Донгшенг Таун, Жонгшан Сіті, Гуангдонг, Китайська народна республіка.

Уповноважений представник виробника:

ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. Голосіївський (40-Річчя Жовтня), 100/2.
Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

Номер редакції: № 2 від 1.11.2023.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Гарантійний термін на обертове крісло для ванної «OSD-Q650100» – 12 місяців з дати продажу за умови виконання вимог Інструкції.





8. Умови гарантії

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:
Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____