



# Стілець для душі: OSD-QA10

## Інструкція

### ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.  
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.  
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Стілець для ванної та душі зі спинкою «OSD-QA10» (далі за папортом – виріб / стілець / стілець зі спинкою / стілець для ванної та душі / санітарно-гігієнічне обладнання / обладнання) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Виріб розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача. Відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.



**Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.**

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** його у випадку зносу або пошкодження.
- НЕОБХІДНО** періодично оглядати виріб на стійкість.
- КОРИСТУВАЧАМ** з обмеженими фізичними можливостями **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** звертатися за допомогою до асистента.
- У ВИПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.



**Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкодження або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.**

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Різновид виробу:	стілець зі спинкою
Колір:	білий
Матеріал сидіння:	пластмаса
Матеріал каркаса:	анодований алюміній
Розміри сидіння, Ш x Г, (см):	40 x 33
Висота спинки від сидіння, (см):	39
Висота виробу від підлоги до сидіння, (см):	41 – 51
Висота виробу від підлоги до спинки, (см):	80 - 90
Максимальне навантаження, (кг):	130
Гарантійний термін, (міс.):	12

### ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

- Стілець для ванни та душі з дренажними отворами.
- 5 рівнів регулювання висоти залежно від потреб користувача.
- Нековзке сидіння з гіпоалергенного пластику швидко нагрівається до температури тіла.
- Знімні поручні з м'якими накладками для безпеки користувача.
- Рама стільця з легкого та міцного анодованого алюмінію, стійкого до корозії.
- Гумові наконечники запобігають ковзанню.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

- Регулювання висоти стільця відбувається за допомогою кнопок на кожній ніжці.
- Установіть потрібну висоту ніжок.
- Як тільки кнопка потрапить у потрібний отвір на ніжці, висота буде зафіксована.
- Переконайтеся у тому, що всі ніжки мають однакову висоту, а всі кнопки потрапили у відповідні отвори.

### ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

**ПРИМІТКА:** Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.

### УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених в Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
  - порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
  - за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонт виробу);
  - якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
  - механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
  - пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
  - пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

*Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.*

**УВАГА:** *Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.*

Дата продажу: \_\_\_\_\_

Підпис/Печатка: \_\_\_\_\_

### ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

**Виріб «OSD-QA10»** відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

**Виробник:** Zhongshan Qunn Medical Equipment Co., Ltd. / Жонгшан Куїн Медікал Еквіпмент Ко., Лтд.  
3rd Booth No. 108 Zhaoyi Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong, The people's republic of China / 3 Бус №108 Чжаойі Роад, Донгшенг Таун, Жонгшан Сіті, Гуангдонг, Китайська народна республіка.

**Уповноважений представник виробника в Україні:** ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр.Голосіївський, 100/2. Тел.: +38 (044) 232 44 51, e-mail: office@osd.com.ua

**Номер редакції:** № 5 від 23.04.2024.

**Термін придатності виробу:** див. на маркованні.

**Гарантійний термін на виріб «OSD-QA10»:** 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених в Інструкції.

