

Реставраційний матеріал INNOVA, VIGODENT, 4g

Стосується каталожних номерів:

50022; 50023; 50024; 50025; 50059; 50060; 50061; 50062; 50039;
50040; 50041; 50042; 50076; 50077; 50108; 50109.

Відтінки:

Innova Transparent
Innova Opaquer
Innova Dentin: A1, A2, A3, A3,5
Innova Enamel: A1, A2, A3, A3,5
Innova Body: A1, A2, A3, A3,5
Innova BL1, BL2

Опис:

Innova — це наногібридний, рентгеноконтрастний естетичний реставраційний композит, наповнений діоксидом цирконію/кремнеземом. Він використовується для прямих і непрямих реставрацій у передній і задній зубах порожнини рота, включаючи виготовлення вкладок, накладок, нанесеного для підтримки зовнішнього та естетичного шару реставрації. Матеріал можна формувати та полімеризувати безпосередньо на зубі пацієнта або у випадках важкодоступності, можна виготовити силіконову форму зуба для моделювання та полімеризації поза порожниною рота (непряма реставрація), а потім прикріпити полімеризований матеріал за допомогою адгезивних систем та додаткових матеріалів. Перед полімеризацією матеріал має властивість прилипати до вже полімеризованого матеріалу так само, як шар композиту прилипає до іншого шару, попередньо нанесеного на зуб (це та сама смоляна матриця). Ця особливість дозволяє згодом відремонтувати реставрацію тим же матеріалом, таким чином уникаючи видалення оригінальної реставрації (консервативна стоматологія). Матеріал полімеризується галогенним або світлодіодним світлом. Його інноваційна концепція надає перевагу естетичній реконструкції з використанням кольорів з різницею непрозорості та напівпрозорості, що дозволяє створювати як реставрації в одному кольорі, так і відтворювати різні зубні структури, поєднуючи різні кольори, непрозорості та в'язкості. Його фізичні властивості забезпечують легкість обробки, полімеризацію, механічної обробки та полірування. Матеріал сумісний з сучасними адгезивними системами емалі/дентином, що дозволяє стоматологам використовувати будь-який бонд відповідно до встановлених показань.

Показання:

- Пряма реставрація на фронтальних і бічних зубах
- Естетична корекція: закриття діастеми та анатомічної вади розвитку зуба
- Ретейнери для зубів з рухливістю
- Вкладки, накладки, вініри
- Ремонт кераміки
- Реставрації V класу (пришийковий карієс, ерозії зубів, малі дефекти класу V), особливо для рецесії ясен, наслідок захворювання пародонту.

Пакування:

- 01 Пластмасовий шприц 4g
- 01 Інструкція із застосування.

Innova відповідає класичній шкалі VITA для дентину/емалі та для ясен відповідають шкалі Томаса Гомеса.

Склад: суміш мономерів, ВНТ, фотоініціатори, наповнювачі, діоксид цирконію/кремнезем та пігменти.

Інструкція по застосуванню:

1. Підбір відтінку реставраційного матеріалу відповідно природному відтінку зуба.
2. Встановлення рабердам системи (ізоляція).
3. Препаруйте уражену порожнину відповідно до рекомендацій композитні реставрації.
4. При необхідності захистіть пульпу прокладочним матеріалом типу гідроксиду кальцію або склоіономерним цементом відповідно до клінічної оцінки.
5. Для анатомічної реставрації зубів та уникнення нависаючих країв, слід використовувати попередньо контурну прозору або металеву матрицю.
6. Здійснити техніку кислотного травлення тканин зуба, відповідно до інструкцій використання матеріалу, який застосовується.
7. Нанесіть праймер та бонд відповідно до інструкцій виробника.
8. Помістіть необхідну кількість Innova в препаровану порожнину відповідним інструментом, адаптауйте його до стінок порожнини. Кожен нанесений шар не повинен мати товщина більше 2 мм.
9. Кожен шар полімеризуйте світлом протягом 40 секунд.
10. Обробіть і відполіруйте реставрацію.
11. Перевірте оклюзію за допомогою артикуляційного паперу. Видаліть зайву висоту прикусу при необхідності.
12. Відполіруйте силіконовими насадками або дисками.

Запобіжні заходи:

Використовувати цей продукт слід суворо дотримуючись інструкції із застосування. Будь-яке використання іншим методом від описаного, залишається під повною та виключною відповідальністю професіонала, який його виконує. Контакт зі слиною та кров'ю під час застосування композиту, може зашкодити реставрації. Рекомендується використовувати рабердам системи. Як профілактичний засіб від можливої реакції пульпи використовуйте в якості основи цемент гідроксиду кальцію, склоіономерний цемент кальцію або іншого типу підкладки, перш ніж вставляти матеріал у порожнину.

Обмеження:

Цей композит світлочутливий і може передчасно полімеризуватися під дією інтенсивного світла. Тому рекомендується завжди тримати контейнер закритим, коли його вміст не використовується. Після виймання з контейнера продукт слід швидко використати. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не слід використовувати з продуктами, що містять фенол, масло гвоздики або цементу оксиду цинку з евгенолом, які можуть впливати на процес полімеризації. Після використання матеріал повинні використовуватися лише авторизовані стоматологи та зуботехнічні лабораторії. Після використання шприци необхідно утилізувати разом з іншими матеріалами за вимогами до стандартів утилізації медичних виробів.

Протипоказання:

Пацієнти, які мають алергію на будь-який з компонентів, рекомендуємо не використовувати. Пряме перекриття пульпи.

Термін дії:

За відповідних умов зберігання Innova має термін дії 36 місяців, навіть після відкриття, якщо він зберігається в оригінальній упаковці та відповідно до умов зберігання. Термін придатності зазначений на упаковці, означає термін максимального

використання продукту. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

Зберігання:

Innova має залишатися в оригінальній упаковці та закритою після використання. Зберігати при кімнатній температурі (15° - 30°C), у сухому місці захищений від світла та тепла. Пряме світло може змінити його властивості. Невідповідні умови зберігання можуть погіршити властивості виробу.

Утилізація:

Утилізуйте відповідно до чинних вимог утилізації медичних відходів відповідно законодавству України. Можна утилізувати разом із побутовими відходами відповідно до офіційних правил та погодження з уповноваженими компаніями утилізації відходів та уповноваженими органами. Утилізувати тільки повністю випорожнені упаковки.



VIGODENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Pesqueira, 26 – Bonsucesso 21041-150, Rio de Janeiro, Brazil

ВІГОДЕНТ ІНДАСТРІА Е СОМЕРСІО ЛТДА

Руа Пескейра, 26 – Бонсуцессо 21041-150, Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «МЕДРИНОК»

43020, Україна, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Зв'язківців, буд. 6
medrynok.pro
medrynok.corp@gmail.com
тел. +380 50 157 42 07



UA.TR.130

Пояснення символів



Дата
виготовлення



Виробник



Використати
до



Код партії



Номер за
каталогом



Захищати від
сонячного світла



Зберігати в
сухому місці



Температурне
обмеження
15°C-30°C



Ознайомлення з
інструкціями для
застосування