

Реставраційний матеріал NT PREMIUM, VIGODENT, 4g

Стосується каталожних номерів:

51266; 51369; 51493; 51272; 51273; 51487; 51488;
51489;;51490;51491; 51281; 51282; 51485; 51486.

Відтінки:

NT Premium Incisal INL (incisal palescent);
NT Premium Incisal IND (incisal neutral);
NT Premium Enamel BL (Bleach);
NT Premium Dentin A2, A3;
NT Premium Enamel A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, C3.

Опис:

NT Premium — це наногібридний, фотополімеризуючий і рентгеноконтрастний естетичний реставраційний композит, який використовується в прямих і непрямих реставрації у фронтальних і жувальних зубах включаючи виготовлення вкладок, накладок, нанесеного для підтримки зовнішнього та естетичного шару реставрації. Матеріал можна моделювати та полімеризувати безпосередньо на зубі пацієнта або у випадках, коли не можливий доступ можна виготовити силіконову форму зуба для моделювання та полімеризації поза порожниною рота (непряма реставрація). Перед полімеризацією матеріал має властивість прилипати до вже полімеризованого матеріалу так само, як шар композиту прилипає до іншого шару, попередньо нанесеного на зуб (це та сама смоляна матриця). Це дозволяє пізніше відремонтувати реставрацію тим же матеріалом, уникаючи видалення оригінальної реставрації (консервативна стоматологія). Матеріал полімеризується (твердіє) за допомогою галогенного або світлодіодного світла. NT Premium - наногібридна композитна смола світлового затвердіння для фронтальних і жувальних зубів, що містить 75% мінеральних наповнювачів.

Склад: Мономери (Bis-GMA, Bis-EMA, TEGMA), ВНТ, фотополіініатори, наповнювачі та пігменти.

Показання до застосування:

Прямі реставрації на фронтальних і жувальних груп зубів. Естетична корекція: закриття діастем та анатомічних дефектів. Утримання рухомих зубів (шинкування). Вкладки, накладки, вініри. Керамічні реставрації. Реставрації V класу (пришийковий карієс, ерозія зуба, малі дефекти V класу), особливо при рецесії ясен внаслідок пародонтиту.

Пакування:

- 01 шприц, що містить 4 г
- 01 Інструкція із застосування

Інструкція із застосування:

1. Перед початком обробки слід очистити поверхню зубів.
2. Підбір відтінку реставраційного матеріалу відповідно природному відтінку зуба.
3. Встановлення рабердам системи (ізоляція).
4. Підготувати порожнину згідно з рекомендацій для композитних реставрацій.
5. За необхідності виконайте захист пульпи за допомогою гідроксиду кальцію або склоіономерним матеріалом відповідно до клінічної оцінки.
6. Для анатомічної реставрації зубів та уникнення нависаючих країв, слід використовувати попередньо контурну прозору або металеву матрицю.
7. Застосуйте техніку кислотного кондиціонування відповідно до інструкції матеріалу, якого використовуєте.
8. Нанесіть адгезив згідно з інструкцією виробника.
9. За допомогою відповідного інструменту внесіть необхідну кількість композиту Premium NT в препаровану порожнину, щільно притискаючи її до стінок порожнини. Кожен шар, що наноситься, повинен бути не більше 2 мм завтовшки.
10. Кожен шар полімеризуйте світлом протягом 40 секунд.
11. Обробіть і відполіруйте реставрацію.
12. Перевірте оклюзію за допомогою артикуляційного паперу. Видаліть зайву висоту прикусу при необхідності.
13. Відполіруйте силіконовими насадками або дисками.

Запобіжні заходи:

Цей виріб призначений для використання тільки так, як зазначено в інструкції з використання. Використання, іншими методами від описаного в інструкції із застосування, є виключною відповідальністю фахівця. Контакт зі слиною та кров'ю під час нанесення композиту може призвести до пошкодження реставрації. Рекомендовано використовувати абсолютну ізоляцію. Ця смола чутлива до світла, надмірно яскраве середовище може спричинити передчасну полімеризацію. Зберігайте виріб закритим, коли він не використовується. Зберігати продукт у недоступному для дітей місці. Не слід використовувати з продуктами, що містять фенол, гвоздичну олію, копальний лак або оксид цинку евгенольні цементи, оскільки вони можуть перешкоджати або впливати на полімеризацію. Зміна кольору може виникнути при використанні катіонних ополіскувачів для порожнини рота, а також протравлювачів зубного нальоту та хлоргексидину. Після використання матеріал повинен бути належним чином закритий. Виключно для використання ліцензованих стоматологів.

Протипоказання:

Не рекомендується використовувати пацієнтам, які мають в анамнезі алергію на компоненти цього продукту. Пряме перекрыття пульпи.

Термін придатності:

При дотриманні належних умов зберігання NT Premium термін придатності 36 місяців. Термін придатності, вказаний на упаковці, є максимальним термін придатності продукту. Не використовуйте після закінчення терміну придатності.

Зберігання:

NT Premium слід зберігати в оригінальній упаковці та щільно закритим. Зберігати при кімнатній температурі (15° - 30° C), в сухому захищеному від світла та тепла місці. Потрапляння прямого світла на продукт може змінити його властивості.

Утилізація:

Утилізуйте відповідно до чинних вимог утилізації медичних відходів відповідно законодавству України. Можна утилізувати разом із побутовими відходами відповідно до офіційних правил та погодження з уповноваженими компаніями утилізації відходів та уповноваженими органами. Утилізувати тільки повністю випороженні упаковки.

**VIGODENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

Rua Pesqueira, 26 – Bonsucesso 21041-150, Rio de Janeiro, Brazil

ВІГОДЕНТ ІНДАСТРІА Е СОМЕРСІО ЛТДАРуа Пескейра, 26 – Бонсуцессо 21041-150, Ріо-де-Жанейро,
Бразилія**Уповноважений представник в Україні:****ТОВ «МЕДРИНОК»**43020, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Зв'язківців, буд. 6
medrynok.pro
medrynok.corp@gmail.com
тел. +380 50 157 42 07

UA.TR.130

Пояснення символів

	Дата виготовлення		Захищати від сонячного світла
	Виробник		Зберігати в сухому місці
	Використати до		Температурне обмеження 15°C-30°C
	Код партії		Ознайомлення з інструкціями для застосування
	Номер за каталогом		