



ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор ПП «ТОРВІД»

С.О. Секунова

«24» лютого 2025 року

ІНСТРУКЦІЯ

щодо застосування нейтралізатора для машинної обробки медичних інструментів **Thermosept (Термосепт) НКЗ**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повна назва засобу – нейтралізатор для машинної обробки медичних інструментів **Thermosept (Термосепт) НКЗ**. *Neutraliser for the machine processing of medical instruments Thermosept® NKZ.*

1.2. Фірма виробник – «Schulke & Maug GmbH» (Німеччина)

1.3.Склад засобу: органічна кислота (лимонна кислота).

1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу - це нейтралізатор на основі лимонної кислоти для автоматизованої обробки медичних приладів та лабораторного обладнання.

Представляє собою концентровану прозору рідину без кольору, не містить фосфатів та ПАР, має відмінну сумісність з матеріалами, запобігає утворенню накипу, оптимізує результати очищення після нейтрального миття, забезпечує ефективну нейтралізацію після лужної очистки. рН засобу складає 2,0, рН – робочого розчину приблизно 3,2.

1.5. Області застосування. Рідкий нейтралізатор, призначений для використання після лужного очищення, під час обробки хірургічних, мікрохірургічних інструментів та інструментів для проведення малоінвазивних операцій, контейнерів з нержавіючої сталі, жорстких ендоскопів, анестезіологічного обладнання, операційного взуття, лабораторного обладнання та дитячих пляшечок. Також використовується після нейтрального очищення для досягнення оптимальної ефективності очищення, для кислотного попереднього очищення інструментів з нержавіючої сталі.

Може використовуватися у мийних або мийно-дезінфікуючих машинах, в автономних моделях, або машинах конвеєрного типу; допускається застосування вручну.

1.6. Застосування. Дозування: після лужного очищення: 0,1 - 0,2% (1 - 2 г/л); після нейтрального очищення: 0,1% (1 г/ л).

Використання демінералізованої води на останньому етапі промивання рекомендується. Дозування для кислого попереднього очищення кислотостійких матеріалів: 0,2 - 0,5 - 1,0% при 40°C - 60°C, час контакту не більше 30 хв. Необхідно ретельно змити демінералізованою водою.

Дозування виконується за допомогою вбудованих в машину дозуючих насосів. Зверніть увагу на рекомендації виробників інструментів.

Рекомендовано застосовувати засіб спільно з ензимним очищувачем **Thermosept (Термосепт) ЕКС-тра**.

2. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ

2.1. Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей при роботі із засобом. Персонал, який виконує роботи з очищення в т.ч. достерилізаційного виробів медичного призначення засобом **Thermosept (Термосепт) НКЗ** має бути забезпечений засобами індивідуального захисту: спецодяг (халат, шапочка, гумові рукавички). Спеціальні рекомендації: Тільки для професійного використання. Будь ласка, зверніть увагу на рекомендації щодо обробки, надані виробниками інструментів.

2.2. Методи утилізації засобу. Партії засобу **Thermosept (Термосепт) НКЗ** з вичерпаним терміном придатності або некондиційні внаслідок порушення умов зберігання підлягають переробці або утилізації. Відпрацьовані робочі розчини підлягають зливу у каналізацію.

3. ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

3.1. Попередження. Може бути корозійним для металів; спричиняти серйозне подразнення очей; може спричинити подразнення дихальних шляхів. Уникайте вдихання парів. При потраплянні в очі: обережно промивайте водою протягом кількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є і ви маєте можливість їх зняти, продовжуйте промивання. Якщо подразнення очей не зникає: зверніться за медичною допомогою/консультацією.

3.2. Спеціальні рекомендації. Тільки для професійного використання. Зверніть увагу на рекомендації щодо обробки, надані виробниками інструментів.


4. ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ

4.1. Пакування засобу. Засіб **Thermosept (Термосепт) НКЗ** випускають у полімерних місткостях ємністю 5 кг. Може входити до складу комплектів.

4.2. Умови транспортування засобу. Засіб **Thermosept (Термосепт) НКЗ** транспортують у пакуванні виробника автомобільним чи залізничним транспортом згідно з правилами перевезення відповідних вантажів автомобільним та залізничним транспортом.

4.3. Терміни та умови зберігання. Засіб **Thermosept (Термосепт) НКЗ** зберігають у пакуванні виробника при температурі від +5°C до +25°C, уникати морозу, спеки та сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання засобу у пакуванні виробника – 5 років з дати виробництва. Термін зберігання засобу, у відкритій та повторно щільно закритій ємності такий же, як і у закритій оригінальній упаковці.

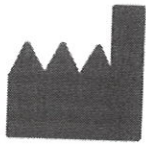

Виробник:
Шюльке і Майр ГмбХ
Роберт-Кох Штрассе 2, 22851 Нордерштедт, Німеччина
Тел. +49 40 52100-0

Графічні символи, вказані на споживчому пакуванні:

	ВИРОБНИК		ВИКОРИСТАТИ ДО
	ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ		ЗНАК ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
	КОД ПАРТІЇ		ПОПЕРЕДЖЕННЯ