

ТОВ «Делмед»
61013, м. Харків, вул. Шевченка 24
тел. +38(095) 616-93-65
zakaz@delmed.net
ЄДРПОУ 23144629
Р/р UA38305299000026007015906991
Харківська філія Приватбанк
МФО 351533
Свідоцтво про держреєстрацію № 14801050002014103

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ
DELMED
www.delmed.com.ua

Інструкція із застосування Стремена Павлика (артикул СП)

грудень 2025 року

Ми використовуємо тендітні бавовняні тканини. Надійну липучку та оброблені металеві рамки.

В основному вперше одягає і регулює стремена на дитині дитячий ортопед або мануальний терапевт, необхідно дотримуватися всіх його інструкцій щодо носіння та одягання. При самостійній зміні стремени, потрібно застібати ремінці приблизно так само як при одяганні фахівцем, а також фіксувати ніжки в такому ж положенні.



Перед початком слід одягнути на малюка м'яку футболку з натуральної тканини та шкарпетки, щоб ремінці не натирали шкіру та не сприяли подразненню та висипанню. Вам потрібно розкрити грудний фіксатор, і липучки, що охоплюють литкові м'язи. Слід покласти грудничка на спинку і акуратно одягнути верхню частину стремени на дитину, простягнувши ручки в плечові лямки і зафіксувавши кріплення на рівні грудей так, щоб грудний пояс сидів щільно, але при цьому не дуже здавлював, і малюк міг дихати на повні груди.

Одягаючи, необхідно оглянути весь виріб, а також спинку, щоб унеможливити перекручування ремінців (не тиснули малюкові коли він лежить на спинці). Нижня частина стремени одягається на носочки, щоб ремінці не тиснули і не натирали ніжну шкіру ніжок. Малюк може чинити опір і вередувати в процесі одягання, але це цілком нормально, спочатку дитині важко звикнути до фіксації такого роду. Необхідно провести просту маніпуляцію із закріплення ремінців у потрібному положенні на передбаченій спеціалістом відстані. Поверх стремени Павлика можна одягнути шкарпетки, щоб ремінці не сковзули, коли малюк активно рухається або намагається повзати.