



DI DENT
dental products

ЛЮКСБОНД

АДГЕЗИВ ДЛЯ ФОТОПОЛІМЕРІВ

Призначення

Люксбонд - однокомпонентний світлотвердіючий адгезив, який застосовується в реставраційній стоматології. Поліфункціональні мономери, що входять до складу адгезиву, забезпечують надійне та міцне зчеплення та крайове прилягання. Може застосовуватися з усіма фотополімерними композитами. Призначений лише для професійного застосування.

Склад

Bis-gma, UDMA, TEGMA, HEMA, камфорохінон, EDAB, спирт.

Властивості

Люксбонд має стабільну та міцну адгезію до емалі та дентину, що були протравлені фосфорною кислотою.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість до компонентів, що входять до складу матеріалу.

Застереження

Містить етиловий спирт. Не вдихайте пари. При потрапленні на шкіру або слизову оболонку може викликати алергічну реакцію або роздратування. Виключіть потраплення матеріалу на шкіру, слизову або очі. Для цього ізолюйте зуб кофердамом, працюйте в гумових рукавичках та захисних окулярах. При попаданні в очі чи на шкіру ретельно промийте водою. Якщо біль чи дискомфорт лишився, зверніться до офтальмолога. Матеріали, що містять евгенол, можуть впливати на полімерізацію Люксбонду.

Спосіб застосування

Перед нанесенням Люксбонду на препаративну поверхню в обов'язковому порядку потрібно обробити трууючим гелем. Нанесіть порцію адгезиву за допомогою мікроаплікатора на поверхню та втирайте протягом 15 секунд. Якщо поверхня, що обробляється виглядає сухою, нанесіть ще порцію бонду. Після нанесення бонду і випаровування розчинника поверхня повинна блищати. Переконайтеся в тому, що бонд нанесено на всю поверхню порожнини.

Полімерізуйте Люксбонд протягом 20 секунд галогеновою або світлодіодною полімерізаційною лампою (не менше 400-500 мВт/см2. При недостатній інтенсивності лампи адгезія буде нестійкою.

Після полімерізації Люксбонду нанесіть і обробіть пломбувальний матеріал відповідно до інструкції виробника.

Форма випуску

Полімерний флакон бмл із світлозахищеного матеріалу.

Умови зберігання

Зберігання в сухому захищеному від світла місці при температурі від 4 до 25C.

Після кожного застосування флакон з матеріалом слід щільно закрити кришкою.

Гарантійний термін зберігання 2 роки з дати виготовлення.

Не використовувати матеріал після закінчення терміну придатності.
Тільки для використання в стоматологічній практиці.



Юридична адреса:

ФО-П Лобанов С.О
61099, Україна, м.Харків, вул.Ощепкова 16а, оф.8.

Адреса потужностей:

27502, Україна, м.Світловодськ,
вул.Приморська 74

Дата останнього перегляду 22 червня 2026 року

Розшифрування символів:



Ознайомлення з інструкціями для застосування



Засторога! Ознайомитися із супровідними документами



Не використовувати при пошкодженні упаковки



Виробник



Дата виготовлення



Використати до



Номер партії



Номер за каталогом



Медичний виріб



Не стерильне



Температурне обмеження



Берегти від вологи



Не допускати впливу сонячного світла



Крихке, поводитися обережно



Мова викладу інструкції: українська



Знак відповідності технічним регламентам

UA, TR, 137

WWW.DIDENT.COM.UA
DIDENT.SHOP@GMAIL.COM



UA, TR, 137



25°C
при зберіганні
5°C