

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ШПРИЦІВ TELINJECT VARIO

Попередження:

Компанія TELINJECT не несе відповідальності за збитки, спричинені неналежним використанням. Необхідно дотримуватися правових норм щодо зброї, захисту тварин і законів про наркотики, а також слідувати інструкціям безпеки фармацевтичних компаній.

Перед практичним використанням слід перевірити функціональність, а наповнення шприца слід практикувати регулярно, щоб гарантувати швидке, безпечне та точне використання на практиці.

Акcesуари для наповнення шприців TELINJECT VARIO



TELINJECT – штифт вентиляційний (**EST**)



TELINJECT – syringe connector // роз'єм для шприца (**EKUP**)




(**LSP20**)

TELINJECT – air syringe // повітряний шприц



(**MSP3**)

TELINJECT – medical syringe // медичний шприц

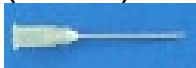

TELINJECT – medical needle// медична голка (**МК**)



(**SCH30V**)

TELINJECT – safety cap // запобіжний ковпачок




TELINJECT – silicone oil // силіконове масло (**SÖ**)

Конструкція шприців TELINJECT VARIO

поршень клапана

камера для лікарського засобу

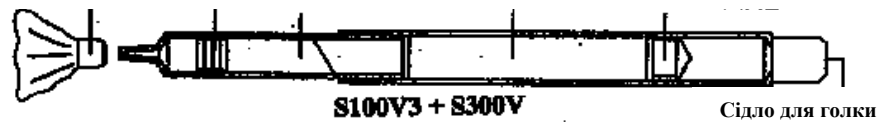

S100V3 + S300V

Сідло для голки


Повітряна камера

STAB5V

поршень клапана

камера для лікарського засобу

поршень лікарського

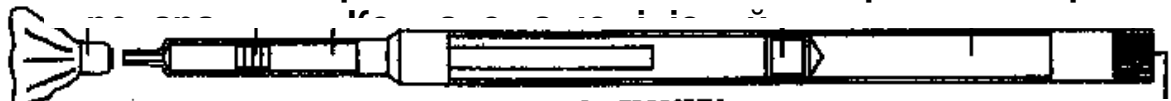

S500VN – S2000VN

Сідло для голки

Наповнення шприца TELINJECT VARIO:



S100V3, S300V



S500VN – S2000VN

Зняти стабілізатор.

При необхідності деаерувати шприц; поршень клапана (синій поршень) повітряної камери повинен бути рухомим.



S100V3 / S300V S500VN –
S2000VN



Приєднайте повітряний шприц до конуса шприца за допомогою з'єднувального елемента.

З усіх шприців VARIO великого об'єму (від 5 мл до 20 мл) необхідно зняти алюмінієвий ковпачок.

Відштовхніть поршень препарату назад, нагнітаючи повітря.



K1538V

Підготовка голки:

Насуньте фіксатор на бічний отвір спеціальної голки. Отвір необхідно повністю закрити.

Силіконовий фіксатор можна використовувати лише один раз через втрату щільності, і перед використанням слід переконатися, що він не пошкоджений.

Спосіб заповнення лікарської речовини:



Використовуйте одноразовий шприц, щоб заповнити камеру для ліків у шприці TELINJECT VARIO.

Щоб зберегти балістичні властивості шприца, його потрібно повністю наповнити. При необхідності додати розчин хлориду натрію або дистильовану воду. Бульбашки повітря, що залишилися, не становлять небезпеки для тварини і не впливають на роботу шприца.

Конус шприца повинен залишатися сухим і вільним від жиру.

S100V3 / S300V S500VN – S2000VN



S100V3 / S300V



500VN – S2000VN

Як надягати голку:

Запечатану спеціальну голку щільними круговими рухами надіньте на конус шприца (можна за допомогою захвату).

У шприцах великого об'єму, будь ласка, закрутіть алюмінієвий ковпачок назад на гніздо голки.

Надіньте запобіжний ковпачок на голку та міцно натисніть на конус шприца.

Захисний ковпачок шприца призначений для вашої власної безпеки та запобігає викиду препарату, якщо може виникнути дефект герметичності рідини.



S100V3 / S300V



S500VN – S2000VN

Перед використанням наповніть приблизно **20 мл (у S500VN-S2000VN 30 мл)** у наповнений шприц TELINJECT VARIO за допомогою повітряного шприца, щоб створити тиск.

Це спрацює, лише якщо ви тримаєте шприц із камерою для ліків у вертикальному положенні.

Приєднайте повітряний шприц до повітряної камери (рухливого поршня) за допомогою з'єднувального елемента та щільно проштовхніть повітря (20 мл) (у S500VN-S2000VN 30 мл) у повітряну камеру; вийміть повітряний шприц, натискаючи.



S100V3 / S300V



S500VN – S2000VN

Огляд:

Коротко постукайте по шприцу.
Поршень клапана повинен міцно
закривати повітряну камеру і бути
нерухомим.



S100V3 / S300V



S500VN – S2000VN

Міцно встановіть стабілізатор на поршень клапана круговими рухами.
**Тепер шприц готовий до використання, його можна безпечно
переносити.**

Перед використанням зніміть захисний ковпачок.
Тепер вставте шприц TELINJECT VARIO в **гвинтівку/пістолет** і
стріляйте.

Якщо наповнений шприц TELINJECT VARIO не використовується, ви можете випорожнити шприц наступним чином:



S100V3, S300V



S500VN – S2000VN

Зніміть стабілізатор.

Видалити повітря зі шприца за допомогою вентиляційної шпильки (поршень клапана повинен бути рухомим).



S100V3 / S300V



S500VN – S2000VN

Тримайте деаерований шприц з голкою у вертикальному положенні та зніміть запобіжний ковпачок і фіксатор. Надати ємність для препарату.



S100V3 / S300V



S500VN – S2000VN

Приєднайте повітряний шприц з'єднувальним елементом до повітряної камери шприца.

Тепер ви можете виїняти препарат зі шприца TELINJECT VARIO, стиснувши повітряний шприц і заповнивши його в наданий контейнер для препарату.

Увага:

У разі додавання до препарату розчину натрію хлориду концентрація змінилася. Тому ви повинні маркувати та зберігати його окремо.

Очищення шприців і голок TELINJECT:

Після використання шприца зніміть голку зі шприца за допомогою захвату.

Зніміть фіксатор і викиньте його.

Тримайте голку під проточною водою, щоб позбутися залишків препарату та крові.

Наберіть воду одноразовим шприцом, приєднайте його до голки та продавіть наповнену воду через голку.

Після цього використовуйте повітряний шприц, щоб проштовхнути повітря через голку, щоб запобігти злипанню залишків води з голкою та тримати голку відкритою.

Нарешті голку можна зберігати.

Введіть повітря в повітряну камеру шприца TELINJECT за допомогою повітряного шприца, щоб створити тиск у шприці.

На одноразовий шприц приєднати з'єднувальний елемент, наповнити його водою і надіти на камеру для препарату.

Простовхніть воду в камеру для ліків і знову видаліть її.

Повторюйте цю дію, доки не буде видалено всі залишки препарату.

Деаеруйте шприц TELINJECT за допомогою вентиляційного штифта, щоб поршень клапана повітряної камери був рухомим.

Одягніть стабілізатор і зберігайте шприц.

Увага!

У повітряній камері не повинно бути рідини.

Повітряна камера завжди повинна бути сухою.

Технічне обслуговування шприців TELINJECT:

Завдяки належному догляду та очищенню шприци TELINJECT можна використовувати кілька разів.

Щоб покращити або зберегти здатність ковзання поршня препарату, ми рекомендуємо використовувати силіконову олію під час очищення.

Відсуньте поршень препарату за допомогою повітряного шприца та прикріпленого з'єднувального елемента до середини.

Обережно закапайте 1-2 краплі силіконової олії (не використовуйте іншу олію!) в камеру для препарату та постійно розподіляйте її, обертаючи шприц TELINJECT.

Найкращих результатів буде досягнуто, якщо силіконова олія зможе прореагувати протягом ночі.

Увага:

Сідло голки має залишатися знежиреним!

Завжди зберігайте шприци TELINJECT незаповненими, при нульовому тиску та з приєднаним стабілізатором при нормальній кімнатній температурі.

Шприци TELINJECT складаються з міцного пластику і повинні використовуватися протягом 3 років.

TELINJECT Ukraine

E-mail: utelinject@gmail.com

Homepage: <https://telinject.com.ua>