

МЕХАНІЧНИЙ РОСТОМІР НАСТІННИЙ 0–200 CM

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Механічний настінний ростомір призначений для точного вимірювання зросту людини від 0 до 200 см. Використовується у медичних закладах, школах, спортивних клубах, дитячих садках, фітнес-центрах та вдома.

2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Діапазон вимірювання	0–200 см
Ціна поділки	1 мм
Тип	Механічний
Монтаж	Настінний
Матеріал	Ударостійкий пластик
Колір	Білий
Живлення	Не потребує

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Ростомір.
- Кріпильні елементи (за комплектацією).
- Інструкція.

4. МОНТАЖ

1. Виберіть рівну вертикальну стіну.
2. Нижній край основи встановіть на рівні чистої підлоги (200 см).
3. За допомогою рівня вирівняйте прилад.
4. Позначте отвори та закріпіть ростомір шурупами.
5. Перевірте, щоб стрічка вільно рухалась.

5. ВИКОРИСТАННЯ

1. Поставте людину босоніж спиною до стіни.
2. П'яти, сідниці та спина повинні торкатися стіни.
3. Голова має бути у горизонтальному положенні.
4. Опустіть вимірювальний упор до дотику з маківкою.
5. Зніміть показник у вікні шкали.
6. Після вимірювання поверніть упор у початкове положення.

6. ДОГЛЯД

Очищуйте сухою або злегка вологою тканиною. Не використовуйте абразивні засоби. Не допускайте сильних ударів та деформації.

7. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Не використовуйте пошкоджений прилад. Надійно закріплюйте його на стіні. Не навантажуйте вимірювальний упор сторонніми предметами.



Уважно прочитайте інструкцію перед використанням.



Використовувати тільки у сухих приміщеннях.



Протирайте м'якою тканиною.



Зберігайте інструкцію для подальшого використання.