

modulmix



MODULMIX. MODULARITY IN PERFECT UNION

Equipment
Automatic mixing unit

Zhermack[®]
CLINICAL





Модульный и
компактный
дизайн

modulmix

Компания **ZHERMACK**, мировой лидер в производстве оттискных материалов и стоматологического оборудования, представляет MODULMIX, новый автоматический смеситель для **A-силиконов с соотношением замешивания 5:1**.

Высочайшие рабочие характеристики в сочетании с модульным персонализируемым дизайном позволяют **MODULMIX** органично вписаться в любой рабочий интерьер.

Одной из важнейших характеристик **MODULMIX** является его универсальность. Выберите подходящий именно Вам вариант и убедитесь в уникальных качествах этого аппарата.

MODULMIX, новейшая разработка компании Zhermack, сочетающая в себе продвинутые технические характеристики, отличное качество и высокую функциональность.



modulmix

ПРИМЕНЕНИЕ



■ Быстрое наполнение оттисковой ложки материалом густой консистенции Heavy Body или Putty при технике двуслойного оттиска



■ Постепенное наполнение шприца материалом средней консистенции Medium Body при монофазной технике



■ Быстрое наполнение оттисковой ложки силиконом, заменяющим альгинатную массу

Двухпозиционная кнопка для легкого переключения двух скоростей выдавливания материала одним лишь нажатием пальца.

modulmix

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможность соединения нескольких устройств в одну линию
- Две скорости выдавливания материала:
 - низкая скорость: 70* мл/мин
 - высокая скорость: 155* мл/мин
- Моторизированные опускание и подъем поршней для ускорения замены картриджа (макс. 3 сек)
- Персонализируемая цветовая гамма для лучшей сочетаемости с обстановкой кабинета
- Эргономичный дизайн
- Контрольная кнопка для правой и левой руки
- Индикатор остаточного уровня силикона в картридже
- Безопасные поршни для максимальной защиты пальцев
- Варианты настольной и настенной установки
- Цифровой таймер в комплекте
- Модификации 230 В и 115 В
- Совместимость со всеми системами 5:1, представленными на рынке в данный момент



Zhermack
CLINICAL

*Источник: внутренние данные Zhermack



■ Модульный дизайн **MODULMIX** (запатентованный Zhermack) был разработан специально для стоматологических кабинетов, в которых необходимо одновременное использование сразу нескольких оттисковых материалов.



■ Персонализируемые щитки 6-ти различных цветов предоставляют возможность органично вписать смеситель в обстановку кабинета.



■ Одним нажатием кнопки возможно выбрать две скорости выдавливания и управлять выходом материала в зависимости от обстоятельств. На высокой скорости возможно наполнить оттисковую ложку в рекордно короткое время (155 мл/мин*). Низкая скорость (70 мл/мин*) рекомендуется для наполнения шприцев для эластомеров.

modulmix

НА ВИДУ



■ Прозрачная защитная крышка позволяет видеть тип используемого материала, время обработки и схватывания, а также уровень остатка материала.



■ Моторизированные поршни опускаются и поднимаются крайне быстро. Нажав на кнопку, их можно полностью поднять всего за 3 секунды, чтобы заменить картридж.



■ Новый динамостатичный смесительный наконечник (запатентованный Zhermack) в сочетании с MODULMIX гарантирует максимальную однородность замешивания.

*Источник: внутренние данные Zhermack



MODULMIX, доступный в 6 различных цветах, вдохнет новую жизнь в обстановку Вашего кабинета и будет прекрасно сочетаться с наиболее популярными цветовыми решениями.

modulmix

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Разработанный для любого стиля работы и доступный в отдельностоящей или модульной версиях, а также в напольной или настенной модификациях, **MODULMIX** отвечает всем профессиональным требованиям.



Отдельностоящая
настольная модель



Модульная
настольная модель




Отдельная
настенная модель



Модульная
настенная модель

Автоматическое двухскоростное смешивание в сочетании с использованием инновационного динамостатичного наконечника* обеспечивает максимальную однородность замешивания (без воздушных пузырьков), не влияя при этом на рабочие характеристики используемого материала.

ТЕХНИКА НА ВИДУ

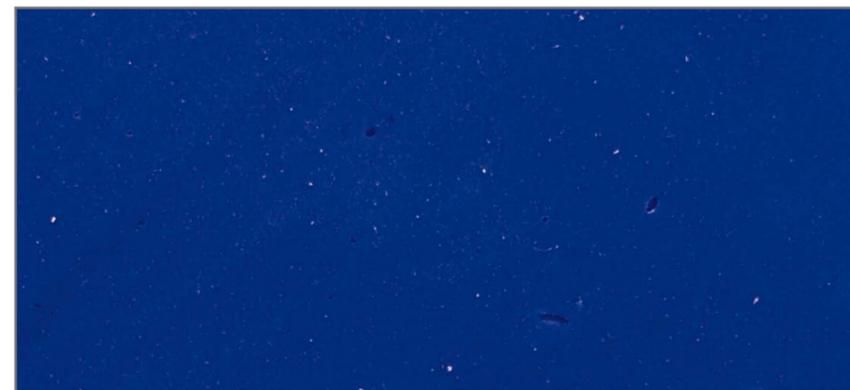

Увеличенный фрагмент результата автоматического замешивания обычного оттискового материала вязкой консистенции heavy body в стандартном картридже 380 мл



Увеличенный фрагмент результата замешивания материала *HYDRORISE heavy body* в картридже 380 мл (Zhermack) с помощью **MODULMIX**

- **MODULMIX** значительно сокращает фазу замешивания, продлевая таким образом время обработки материала
- Автоматическое замешивание с помощью запатентованной **ZHERMACK** системы оказывается более простым, надежным и качественным, чем ручное смешивание

- При использовании А-силиконов в картридже 380 мл стоимость одного оттиска сокращается практически на 50% относительно использования того же материала в картриджах 50 мл
- Автоматическое выдавливание силикона уменьшает усилия, которые необходимо прилагать при замешивании и дозировке вручную



Модели

Код	Модель	Габариты	Вес	Напряжение	Входная мощность
С309030	АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ MODULMIX 230 В	Д224 / Ш372/ В320	10 кг	230В ± 10% 50/60 Гц	160 Batt
С309031	АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ MODULMIX 230 В UK	Д224 / Ш372/ В320	10 кг	230В ± 10% 50/60 Гц	160 Batt
С309035	АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ MODULMIX 115 В	Д224 / Ш372/ В320	10 кг	115В ± 10% 50/60 Гц	160 Batt

Стандартная комплектация

Боковые панели серого цвета
Основание
Цифровой таймер
Питание

Аксессуары

XR0240550	Боковые панели голубого цвета	XR0240520	Набор для настенного монтажа
XR0240551	Боковые панели оранжевого цвета	XR0240530	Набор для настенного монтажа двух Modulmix
XR0240552	Боковые панели синего цвета	XR0240510	Набор для модульного подключения
XR0240553	Боковые панели зеленого цвета	XR0240500	Настольное основание для двух Modulmix
XR0240554	Боковые панели белого цвета	XR0240615	Питание 115 В
		XR0240630	Питание 230 В

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH
Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72
+48 - 22 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195
Tel. +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
Fax +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

COUNTRY CONTACTS

UK AND IRELAND
Tel. +44 - (0)7870 690811
uk@zhermack.com

SPAIN
Tel. 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com

FRANCE
Tel. +0800 - 915083
info.france@zhermack.com

RUSSIA
Tel. +7 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Tel. +52 - 1 - 55 - 91980497
info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
Tel. +57 - 310 - 2601 777
info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com