

Рекомендации по наложению
повязок для иммобилизации 3M™ Soft Cast та 3M™ Scotchcast™

Современная альтернатива



неудобному гипсу!



3M

3M™ Soft Cast та 3M™ Scotchcast™

Рекомендации по наложению повязок для иммобилизации нижней конечности

Повязка до верхней трети бедра со стабилизацией коленного сустава

Рекомендуемый материал:

Продукт	Ширина
1.25 м x Stockinet™	7.5 или 10 см
2 рулона Soft Cast	10 см
1 рулон Scotchcast™ Plus	10 или 12.5 см



Повязка со стабилизацией голеностопного сустава в сагиттальной плоскости

Рекомендуемый материал:

Продукт	Ширина
75 см Stockinet™	5 или 7.5 см
1 рулон Soft Cast	10 см
1 рулон Scotchcast™ Plus	7.5 см



Повязка до верхней трети бедра со стабилизацией коленного и голеностопного суставов

Рекомендуемый материал:

Продукт	Ширина
1.25 м x Stockinet™	7.5 или 10 см
2 рулона Soft Cast	10 см
1 рулон Scotchcast™ Plus	7.5 или 10 см



Тутор со стабилизацией коленного сустава

Рекомендуемый материал:

Продукт	Ширина
1.25 м x Stockinet™	7.5 или 10 см
2 рулона Soft Cast	10 см
1 рулон Scotchcast™ Plus	10 см



* Защитите проксимальную головку малоберцовой кости с помощью синтетической подкладки Cast Padding™.

Повязка до коленного сустава с возможностью осевой нагрузки

Рекомендуемый материал:

Продукт	Ширина
75м x Stockinet™	5 или 7.5 см
1 рулон Soft Cast	10 см
1 рулон Scotchcast™ Plus	7.5 см



* Используется для защиты костных выступов: головки малоберцовой кости, лодыжек.

Советы по применению

Защитите кожу, наложив слой хорошо облегающего конечность подшивного чулка, при этом подкладочная синтетическая вата не требуется.

Наложите, где необходимо для защиты костных выступов, небольшой отрезок Cast Padding™ (но не циркулярно). Если иммобилизация производится до коленного сустава, накладывайте первый слой Soft Cast и последующую вставку из Scotchcast™ в сухом состоянии до верхней трети бедра.

Второй, заключительный слой Soft Cast накладывайте во влажном состоянии. В заключение наложите обычный влажный тканевой эластичный бинт (либо эластичный аутоадгезивный бинт Coban™) для лучшей адгезии слоев, смачивания и моделирования повязки. Для подрезания либо снятия повязки можно использовать обычные ножницы для рассечения повязок.

Темный фиолетовый цвет показывает расположение материала Scotchcast™.

Светлый фиолетовый цвет показывает расположение материала Soft Cast.



3M™ Soft Cast






Рекомендации по наложению повязок на область голеностопного сустава

Рекомендуемый материал (взрослые)

Продукт	Ширина
50 см x Stockinet™	5 или 7,5 см
1 roll x Soft Cast	7,5 см

Рекомендуемый материал (дети)

Продукт	Ширина
50 см x Stockinet™	5 см
1 roll x Soft Cast	5 см

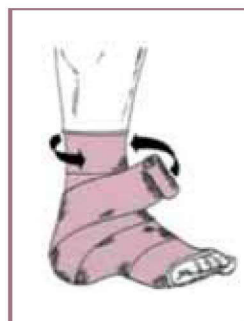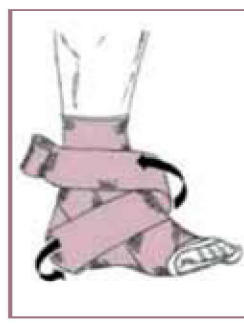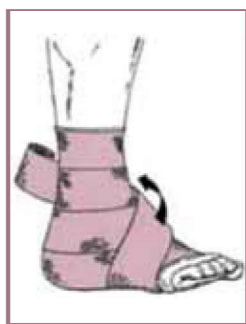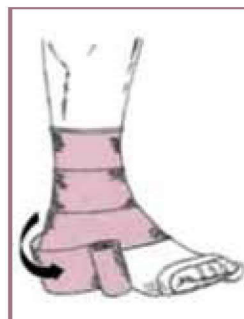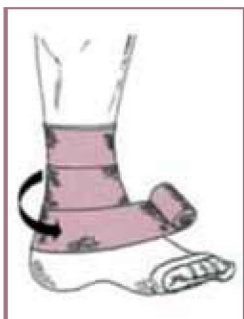

Светлый фиолетовый цвет обозначает расположение материала Soft Cast.
Серый цвет показывает расположение Cast Padding™.

Советы по применению

Защитите кожу, наложив слой хорошо облегающего конечность подшивного чулка, подкладочная синтетическая вата не требуется.

Край повязки должен закрывать головку 5 плюсневой кости и быть чуть позади головки первой. Это важно для ношения обуви. Расположите небольшой отрезок Cast Padding™ в проекции лодыжек, ахиллова сухожилия и по передней поверхности голеностопного сустава.

Смочите рулон Soft Cast в воде и накладывайте на Stockinet™ спиральными турами, соблюдая технику «пяточного замка».

Поставьте стопу подошвой на пол и приложите осевую нагрузку для более функционального моделирования повязки.

В заключение, наложите обычный влажный тканевой эластичный (либо эластичный аутоадгезивный бинт Coban™) для лучшей адгезии слоев и моделирования повязки.

На конечность в повязке можно надевать туфли на шнурках либо спортивную обувь.

Для подрезания либо снятия повязки можно использовать обычные ножницы для рассечения повязок.


3M™ Soft Cast та 3M™ Scotchcast™

Рекомендации по наложению повязок для иммобилизации верхней конечности

Иммобилизация при повреждении ладьевидной кости

Рекомендуемый материал:

Продукт	Ширина
50 см Stockinet™	5 или 7.5 см
10 см Stockinet™	2.5 см
1 рулон Soft Cast	7.5 см
1 рулон Scotchcast™ Plus	7.5 см

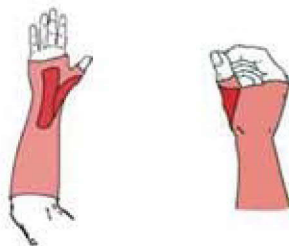


Повязка на предплечье

Рекомендуемый материал:

Продукт	Ширина
50 см x Stockinet™	5 или 7.5 см
1 рулон Soft Cast	5 или 7.5 см
1 рулон Scotchcast™ Plus	7.5 см


Накладывайте первый слой Soft Cast и последующую вставку из Scotchcast™ в сухом состоянии. Второй, заключительный слой Soft Cast накладывайте во влажном состоянии.

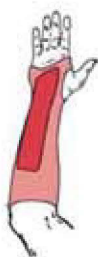

Повязка до верхней трети плеча со стабилизацией кистевого сустава

Рекомендованный материал:


Продукт	Ширина
75 см Stockinet™	5 или 7.5 см
2 рулона Soft Cast	5 или 7.5 см
1 рулон Scotchcast™ Plus	7.5 см

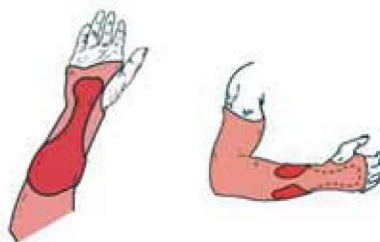

Повязка до верхней трети плеча со стабилизацией локтевого сустава

Рекомендованный материал:


Продукт	Ширина
75 см x Stockinet™	5 или 7.5 см
2 рулона Soft Cast	5 или 7.5 см
1 рулон Scotchcast™ Plus	7.5 см

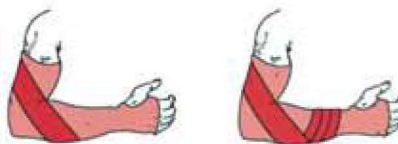

Повязка до верхней трети плеча со стабилизацией кистевого и локтевого суставов

Рекомендованный материал:

Продукт	Ширина
75 см x Stockinet™	5 или 7.5 см
2 рулона Soft Cast	5 или 7.5 см
1 рулон Scotchcast™ Plus	5 см

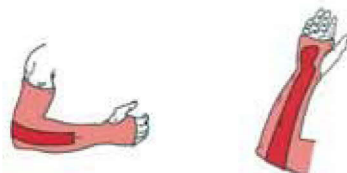

Советы по применению

Защитите кожу, наложив слой хорошо облегающего конечность подшивного чулка, подкладочная синтетическая вата не требуется.

Наложите, где необходимо для защиты костных выступов, небольшой отрезок Cast Padding™ (но не циркулярно).

Накладывайте первый слой Soft Cast и последующую вставку из Scotchcast™ в сухом состоянии. Второй, заключительный слой Soft Cast накладывайте во влажном состоянии.

В заключение наложите обычный влажный тканевой эластичный бинт (либо эластичный аутоадгезивный бинт Coban™) для лучшей адгезии слоев, смачивания и моделирования повязки.

Для подрезания либо снятия повязки можно использовать обычные ножницы для рассечения повязок.

 Красным цветом показано расположение материала Scotchcast™.

 Розовым цветом показано расположение материала Soft Cast.